

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

THERABAND KINESIOLOGY TAPE


SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: Performance Health, Hygenic Corporation, Akron OHIO USA

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: Mediland srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARSE (MI)

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): 1388021/R

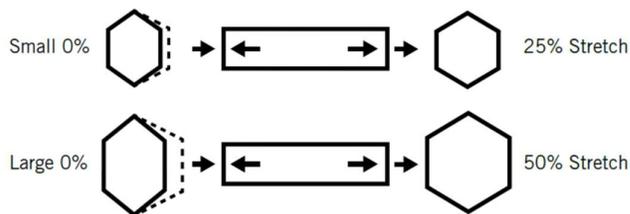

DESCRIZIONE

Tape neuro-muscolare, il Thera-Band® **Kinesiology Tape** elimina i rischi di applicazione erranea, anche per i principianti, grazie all'esclusiva X-act-Stretch™ Technology. I nostri indicatori guida consentono di applicare il tape sempre con la corretta tensione.

COMPOSIZIONE

98% Cotone, 2% Spandex
Latex Free

INDICAZIONI CLINICHE

- Allevia il dolore
- Fornisce supporto a muscoli e articolazioni
- Coadiuvante nel trattamento dell'edema

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'applicazione

Lavare l'area per rimuovere lo sporco, olio, creme o lozioni. Rimuovere i peli nella zona di applicazione. Applicare almeno 60 minuti prima dell'allenamento e della doccia.

Applicazione

Rompere la carta di protezione del nastro e staccarla, piegare gli ultimi 3-5 di carta non rimossa su se stessa per una facile maneggevolezza. Indipendentemente dalla tensione che si dovrà dare al tape per i differenti usi, si applicano sempre gli ultimi 3-5 pollici di nastro senza allungare, come ancoraggio. Non toccare l'adesivo. Non tendere

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

eccessivamente il nastro. Dopo l'applicazione, strofinare il tape con la carta rimossa per creare calore che attiva l'adesivo.

Rimozione del tape

Rimuovere lentamente, premendo sulla pelle intorno al tape. Il tape può rimanere in situ per un periodo di 5 giorni. Per un'applicazione dettagliata e ulteriori informazioni visitare il sito TheraBandKTape.com

AVVERTENZE

Interrompere l'uso in caso di irritazione cutanea. Non applicare su cute irritata o lesa. I bambini devono usare il prodotto sotto la supervisione di un adulto. Dispositivo monouso

Theraband™ Kinesiology Tape

Box da 5 cm x 31,5cm

- 305460 Nero
- 305461 Nero/Grigio
- 305462 Beige
- 305463 Blu



Box da 5 cm x 5 m

- 305464 Nero/ Grigio
- 305465 Nero/ Bianco
- 305466 Beige
- 305467 Blu
- 305468 Rosa/Bianco

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy



sede legale:
via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

305469 Rosso/Nero
305470 Verde/Giallo

Strisce Pre-tagliate da 5 cm x 24,5 cm (20 per confezione)

305471 Nero/Grigio
305472 Nero/Bianco
305473 Beige
305474 Blu
305475 Rosa/Bianco
305476 Rosso/Nero



CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

