

## SPRAYGEN 2.0

### Dispositivo medico disinfettante

#### Proprietà e Campo d'impiego:

Disinfettante pronto all'uso per dispositivi medici riutilizzabili, di tipo invasivo e non, superfici di dispositivi medici esposte al pericolo di contaminazione microbiologica in campo sanitario.

Superfici esterne di attrezzature mediche chirurgiche, letti e poltrone bilancia, computer dedicati ad attrezzature mediche, tastiere, unità periferiche, microfoni, telecamere, scrivanie, tavoli tecnici, terminali di apparecchiature tecniche, parti non invasive ed invasive, compatibili, di strumenti elettromedicali e di laboratorio biomedico.

Attivo contro batteri, micobatteri, miceti, funghi e virus.

#### Caratteristiche chimico-fisiche:

Aspetto: liquido  
 odore: nota profumata  
 densità a 20°: 0,856 Kg/L  
 pH su tal quale: 6,5± 0,5

#### Composizione (Reg. CE 648/2004)

100 ml di prodotto contengono: 0,5 grammi di didecil-dimetil ammonio cloruro; 0,06 grammi clorexidina di gluconato; 70 ml alcol etilico DS, coformulanti ed acqua q.b. a 100

#### Dosi e Modalità di impiego

SPRAYGEN 2.0 si impiega tal quale, spruzzandolo sulla superficie da trattare, se priva di anfratti e discontinuità, o su panno idoneo con il quale intervenire sulle superfici da disinfettare, nel passaggio finale usare panno pulito e lasciare asciugare. Tempi di contatto: 10 minuti. Adatto anche per la conservazione aseptica di strumentario pulito, rimuovere il dispositivo e sottoporlo a risciacquo con acqua idonea. Su dispositivi medici invasivi effettuare un accurato risciacquo con acqua idonea dopo il trattamento, leggere il manuale del dispositivo da disinfettare.

#### USO PROFESSIONALE

Prodotto disinfettante da impiegare su dispositivi medici non monouso, non utilizzare sull'uomo e su animali. Non utilizzare su apparecchiature elettriche in tensione.

Consultare sempre il manuale del dispositivo da trattare nelle sezioni pertinenti la pulizia e la disinfezione.

#### EFFICACIA DISINFETTANTE

Si riportano di seguito i dati relativi all'efficacia battericida, micobattericida, fungicida e virucida del preparato.

Concentrazione testata di SPRAYGEN 2.0 –FT17	Normativa applicata	Microrganismo	Tempo di contatto	Attività biocida SPRAYGEN 2.0 –FT17
tal quale	UNI EN 14561	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	10'	Battericida
tal quale	UNI EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442	10'	Battericida
tal quale	UNI EN 14561	<i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	10'	Battericida

Concentrazione testata di SPRAYGEN 2.0 –FT17	Normativa applicata	Microrganismo	Tempo di contatto	Attività biocida SPRAYGEN 2.0 –FT17
tal quale	UNI EN 14562*	<i>Candida albicans</i> ATCC10231	10'	Fungicida
tal quale	UNI EN 14562	<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	10'	Fungicida

Concentrazione testata di SPRAYGEN 2.0 –FT17	Normativa applicata	Microrganismo	Tempo di contatto	Attività biocida SPRAYGEN 2.0 –FT17
tal quale	UNI EN 14563	<i>Mycobacterium avium</i> ATCC157691	10'	Micobattericida
tal quale	UNI EN 14563	<i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755	10'	Micobattericida Tubercolicida

Concentrazione SPRAYGEN 2.0 –FT17	Normativa applicata	Microrganismo	Tempo di contatto	Attività biocida SPRAYGEN 2.0 –FT17
tal quale	biblografia	<i>Virus envelope *</i> (HIV- HBV HCV)	5'	Virucida
tal quale	UNI-EN14476	<i>Poliovirus type 1</i> <i>LSc-2ab Eurovir Hygiene</i> <i>Institut</i>	10'	Virucida
tal quale	UNI-EN14476	<i>Adenovirus type 5</i> <i>strain Adenoid 75 ATCC VR-5</i>	10'	Virucida
tal quale	UNI-EN14476	<i>Murine Norovirus MNV strain</i> <i>599 Berlin Friedrich Loeffler</i> <i>Institute RVB-0651</i>	10'	Virucida

Test effettuati presso Centri di Saggi riconosciuti dal Ministero della salute ed effettuati in "dirty conditions"

## Avvertenze

- Conservare la confezione chiusa in luogo riparato lontano da fonti di calore, consultare la scheda di sicurezza.

## Confezioni

CE12-M flacone da 1L (cartone da 12 pezzi con 3 spruzzatori)

Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. D.M. rientrante nella classe IIB ai fini della Direttiva 93/42/CEE e Dir 2007/47/CEE e s.m.i.



**Mondial – 35010 Limena (Padova) via don G. Zonta,3 – tel.049768712 fax 049769497**

**DISTRIBUITO DA: Pharma Trade Company s.r.l.- via Torazza 115/121, 20861 Brugherio (MB) - [039.2142186](tel:039.2142186) - [info@pharmatrade.it](mailto:info@pharmatrade.it)**