

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON APPOGGI ANTIBRACHIALI
DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON APPOGGI SOTTOASCELLARI
DE1-DE2

Istruzioni d'uso e manutenzione



questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata dalla Direttiva 2007/47/CE come prescritto dall'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.



Importante

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle. Seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza. Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente a **Termigea s.r.l.**

1. AVVISI PER LA SICUREZZA	3
2. DESTINAZIONE PREVISTA	3
3. SCHEDA TECNICA	3
4. ETICHETTATURA	3
5. INSTALLAZIONE ED USO	3
6. PULIZIA E MANUTENZIONE	4
7. DEPOSITO	4
8. SMALTIMENTO	4
9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER IL DISPOSITIVO MEDICO	5
10. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA	6
11. MODULO DI RESO	7

1. Avvisi per la sicurezza

- ☞ Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto.
- ☞ Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia.
- ☞ Usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato.
- ☞ Non effettuate modifiche o riparazioni. Se il prodotto presentasse dei difetti o danni, avviate immediatamente il Vs. rivenditore.

2. Destinazione prevista

Il deambulatore pieghevole con appoggi sottoascellari/antibrachiali è destinato a tutte quelle persone che hanno problemi di deambulazione. Il modello è dotato di appoggi sottoascellari/antibrachiali per un maggior sostegno del paziente che lo adoperi.

3. Scheda Tecnica

- Struttura in tubolare di acciaio verniciato blu
- Dotato di quattro ruote piroettanti, di cui le due posteriori con freno
- Dotato di appoggi antibrachiali rivestiti in pelle e di maniglie (DE1), che consentono un comodo appoggio, regolabili in altezza da 111 cm. a 150 cm.
- Dotato di appoggi sottoascellari rivestiti di morbida gomma lavabile (DE2), che consentono un comodo appoggio, regolabili in altezza da 111 cm. a 150 cm.
- Portata massima 100 Kg


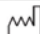


Dimensioni aperto:

- Larghezza interna 46 cm.
- Larghezza totale 53 cm.
- Profondità totale 74 cm.

Dimensioni chiuso:

- Larghezza 74 cm.
- Profondità 16 cm.

4. Etichettatura

CODICE ARTICOLO:	
 prodotti ortopedici e sanitari	
Sede Via Aldrovandi, 1/A - 56121 Ospedaleto-Pisa www.termigea.it - info@termigea.it	
	<input type="text"/>
LOT	<input type="text"/>
Numero di serie	<input type="text"/>
PORTATA MASSIMA: Kg.	
 	Consultare le istruzioni per l'uso
Made in P.R.C.	
	

5. Installazione ed uso

5.1 Installazione

1. Aprire il deambulatore ed inserire la parte frontale costituita dal maniglione nei due appositi alloggiamenti situati nella parte anteriore del deambulatore stesso.

2. Inserire successivamente negli appositi fori sui lati del deambulatore gli appoggi antibrachiale (DE1)/ i supporti ascellari (DE2) e sbloccare i morsetti per regolarne l'altezza.
3. Scegliere l'altezza desiderata e bloccare i morsetti laterali.
4. Inserire, infine, gli appoggi ascellari sui corrispondenti supporti. (solo DE2)
5. Inserire, infine, le maniglie negli appositi fori sottostanti l'appoggio in pelle e fissare le viti di bloccaggio. (solo DE1)

5.2 Uso

Per utilizzare il dispositivo il paziente, ponendosi tra le due fiancate del deambulatore, deve afferrare con entrambe le mani il maniglione e appoggiare le ascelle sugli appositi dispositivi di sostegno.

- Il deambulatore deve essere sempre impugnato per il maniglione. Usare precauzione nel far procedere il paziente.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il maniglione, gli ascellari (DE2)/gli antibrachiali (DE1), ed i morsetti laterali siano inseriti e bloccati correttamente.
- L'impiego del deambulatore è consentito per uso interno ed esterno su superfici compatte.
- Non utilizzare il dispositivo su superfici sconnesse o irregolari, su pavimenti bagnati o scivolosi, su gradini o scale. L'utilizzo su superfici non compatte può compromettere la stabilità di appoggio, provocando cadute e esioni all'utilizzatore

6. Pulizia e manutenzione

Per conservare gli articoli al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi del sole, il contatto con ambienti salini, il deposito in ambienti molto umidi.

Verificare sempre che i dadi di bloccaggio siano sempre ben stretti.

In base alla frequenza di utilizzo, verificare l'usura delle ruote e provvedere alla loro sostituzione nel caso in cui presentino abrasioni o lacerazioni.

Pulire senza utilizzare prodotti abrasivi o solventi. Asciugare con cura.

Se necessaria la disinfezione, usare solo prodotti idonei non corrosivi.

Utilizzare solo ricambi originali.

7. Deposito

Immagazzinate la carrozzina in un posto asciutto e protetto dalla polvere.

8. Smaltimento

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.