

EURODEFIPADS®

Elettrodi multifunzione monouso, per defibrillazione esterna, cardioversione sincronizzata transtoracica, elettrostimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECG. Progettati per la connessione diretta a cavi e defibrillatori, sono caratterizzati da una bassa impedenza ed una ridotta soglia di stimolazione, con un'ottima adattabilità alla cute del paziente. Sono disponibili modelli per pazienti adulti, pediatrici ed anche adulti/pediatrici, in varianti radiotrasparenti e preconnettibili. Alcuni modelli pediatrici da utilizzare con defibrillatori automatici (AED) prevedono un sistema di riduzione dell'energia. I prodotti non contengono lattice né ftalati.

Disposable multifunction electrodes for external defibrillation, transthoracic synchronized cardioversion, transcutaneous cardiac stimulation and ECG monitoring. Designed for direct connection to cables and defibrillators, they are characterized by a low impedance and a reduced stimulation threshold, with an excellent adaptability to the patient's skin. Models are available for adult, paediatric and even adult/paediatric patients, in radiotransparent and preconnectable variants. Some paediatric models to be used with automatic external defibrillator (AED) are available with energy reduction system. The products are latex-free and phthalates-free.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Serie Series	ADULTI >8 anni (> 25 kg) ADULT >8 years (> 25 kg)			PEDIATRICHE <8 anni (< 25 kg) PAEDIATRIC <8 years (< 25 kg)		ADULTI / PEDIATRICHE >1 anno (> 10 kg) ADULT / PAEDIATRIC >1 year (> 10 kg)
	STANDARD	CAVO FUORI BUSTA LEAD OUT	RADIOTRASPARENTI cavo dentro/fuori busta RADIOTRASPARENT lead in/out	STANDARD/ CAVO FUORI BUSTA STANDARD/LEAD OUT	RADIOTRASPARENTI cavo dentro/fuori busta RADIOTRASPARENT lead in/out	STANDARD/ CAVO FUORI BUSTA STANDARD/LEAD OUT
Larghezza minima dell'anello adesivo <i>Minimum width of the adhesive ring</i>	0,7 cm	0,7 cm	0,7 cm	0,7 cm	0,7 cm	0,7 cm
Superficie totale (minima, per ogni elettrodo) <i>Total surface (minimum, for each electrode)</i>	148 cm ²	136 cm ²	148 cm ²	75 cm ²	75 cm ²	148 cm ²
Area attiva (minima, per ogni elettrodo) <i>Active area (minimum, for each electrode)</i>	95 cm ²	94 cm ²	95 cm ²	40 cm ²	40 cm ²	95 cm ²
N. di scariche sopportate dall'elettrodo <i>Nr. of discharges that the electrode can withstand</i>	50 @ 360 J	50 @ 360 J	50 @ 360 J	50 @ 100 J	50 @ 100 J	50 @ 360 J
Gel elettroconduttivo <i>Electro-conductive gel</i>	Gel adesivo conduttivo a bassa impedenza <i>Low impedance conductive adhesive gel</i>					
Materiale conduttivo <i>Conductive material</i>	Lamina di metallo <i>Metal sheet</i>					
Materiale di supporto <i>Support material</i>	FOAM medicale <i>Medical FOAM</i>					
Connessione <i>Connection</i>	Connettore antishock di sicurezza o a clip, a seconda dei modelli <i>Safety antishock or clip connection, according to the model</i>					
Lunghezza del cavo <i>Cable length</i>	Vedi lista di compatibilità nelle pagine seguenti <i>See compatibility list on the following pages</i>					
Compatibilità <i>Compatibility</i>	Vedi lista di compatibilità nelle pagine seguenti <i>See compatibility list on the following pages</i>					
Tempo max di monitoraggio ECG <i>ECG monitoring maximum time</i>	24 h					
Conformità alle normative <i>Compliance to regulations</i>	Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe IIb <i>Regulation (EU) 2017/745. Class IIb medical device.</i> ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.					

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

Confezionamento primario <i>Primary packaging</i>	1 coppia in busta di polietilene e alluminio termosaldato con preincisione laser e tacca di apertura facilitata <i>1 pair in polyethylene and aluminum sealed pouch, with laser pre-cut and notch for easy opening</i>
Confezione di vendita <i>Sale packaging</i>	10 coppie in scatola di cartone (5 coppie per la serie "Pediatriche") <i>10 pairs in carton box (5 pairs for "Paediatric" Series)</i>
Temperatura operativa <i>Operating temperature</i>	Compresa tra 0°C e +50°C <i>Between 0°C and +50°C</i>
Immagazzinamento <i>Storage</i>	Conservare in luogo asciutto, con temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Gli elettrodi confezionati possono essere esposti a temperature estreme, da -30°C a +65°C, per un massimo di 7 giorni. Una conservazione prolungata e/o ripetuta a temperature estreme riduce la vita residua del prodotto. <i>To be stored in a dry place, with temperature between +5°C and +35°C. Packaged electrodes can be exposed to extreme temperatures, from -30 °C to +65 °C, for up to 7 days. Prolonged and / or repeated storage at extreme temperatures reduces the residual shelf life of the product.</i>
Vita utile <i>Shelf life</i>	30 mesi dalla data di produzione <i>30 months from manufacturing date</i>
Scadenza <i>Expiry date</i>	Riportata sulla confezione <i>Indicated on the packaging</i>

COMPOSIZIONE DEL REF
REFERENCE KEY

REF

F

7

9

50

W

9 : Standard

7 : elettrodo e cavo radiotrasparenti
radiotransparent electrode and cable

50→98 : serie
series

- : adulti-adult

W : adulti preconnettibili-adult preconnectable

P : pediatriche-paediatric

PW : pediatriche preconnettibili
paediatric preconnectable

PL : pediatriche ad energia ridotta
paediatric, reduced energy

WPL : preconnettibili, pediatriche, ad energia ridotta
pre-connectable, paediatric, reduced energy

U : adulti/pediatriche-adult/paediatric

UW : adulti/pediatriche preconnettibili
adult/paediatric preconnectable

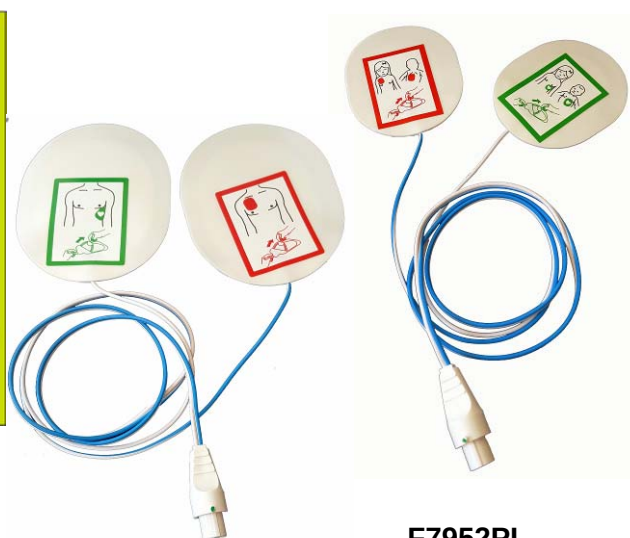
Non tutte le combinazioni sono disponibili. Verificare l'effettiva disponibilità nelle pagine seguenti.
Not all combinations are available. Verify actual availability on the following pages.

ESEMPI DI ALCUNI MODELLI - EXAMPLE OF SOME MODELS



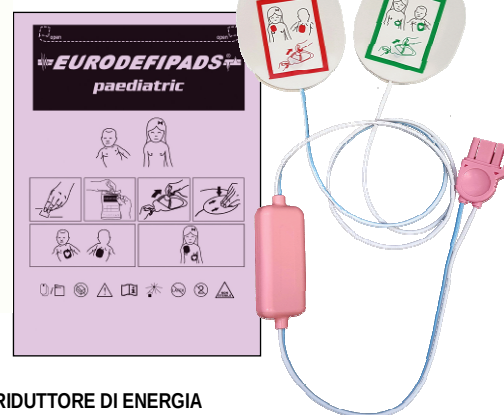
F7953

Serie ADULTI STANDARD
ADULT STANDARD series



F7953P

Serie PEDIATRICHE STANDARD
PAEDIATRIC STANDARD series



F7952PL

Serie PEDIATRICHE CON RIDUTTORE DI ENERGIA
PAEDIATRIC REDUCED ENERGY series



F7750

Serie ADULTI RADIOTRASPARENTE
ADULT RADIOTRSPARENT series



F7955W

Serie ADULTI CAVO FUORI BUSTA
ADULT LEAD OUT series



LISTA DI COMPATIBILITA' - COMPATIBILITY LIST

Marca defibrillatore Defibrillator brand		Modello - Model				Serie - Series								Connettore Connector							
PHILIPS						F7950	F7950W	F7750	F7750W	F7950P	F7950PW	F7750P	F7950PL	F7950WPL	F7950U	F7950UW	F7750U	 F7950	 F7950W	 F7750	
		Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):	120	120	100	100	120	120	100	120	120	120	120	120	120	120	100	F7750W	F7950U	F7950UW	F7750U
		Heartstream ForeRunner AED (E, S, EM)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		HeartStart FR AED (940010XX, 940020XX, 940030XX)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Heartstream/HeartStart FR2 AED (M3840A, M3841A), FR2+ AED (M3860A, M3861A)	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	●	●	●	¥	¥	¥	¥	¥	¥
		HeartStart FR3 AED (ECG 861389, Text 861388) *	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	¥	¥	¥	¥	¥	¥
		HeartStart 4000 (M5500B) **	●	●	●	●	(1)	●	(1)	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Heartstream/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) **	●	●	●	●	(1)	●	(1)	(1)	(1)	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#
		HeartStart MRx (M3535A, M3536A) **	●	●	●	●	(1)	●	(1)	(1)	(1)	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#
		HeartStart XL+ (861290) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
		Efficia DFM100 (866199) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
		HeartStart Intrepid (867172) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●


F7950P


F7750P


F7950PL


F7950WPL

F7950PL, F7950WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente / reduced energy: defibrillator output of 150J is reduced to 50J

(1) Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico. / Do not use with fully automatic defibrillators (AED); the pediatric function and/or the energy delivered must be set manually according to the instructions of the specific defibrillator.

(¥) Usare solo su pazienti adulti (> 25kg) / Use only on adult patients (> 25kg)

(#) In modalità AED usare solo su pazienti adulti (> 25kg) / In AED mode use only on adult patients (> 25kg)

* Gli elettrodi sono compatibili con l'apparecchio per la terapia, ma non possono essere lasciati connessi all'FR3 in modalità standby o spento a causa dell'attività di autodiagnostica dell'apparecchio / Electrodes will operate with device for therapy, but cannot be left attached while FR3 is in standby mode or while turned off due to self-test activity of the device

** con cavo elettrodi a mani libere M3508A o 989803197111 / with hands-free pad cables M3508A or 989803197111

			F7951	F7951/300	F7951W	F7751	F7751W	F7951P	F7951PW	F7751P	F7751PW	
		Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):	120	300	120	100	100	120	120	100	100	
Zoll Medical Corp	PD 1200, PD 1400, PD 1600, PD 1700, PD 2000		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	E Series		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	M Series - M Series CCT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	R Series		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	X Series		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M&B	Propaq MD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	AED 7000		●	●	●	●	●	-	-	-	-	

		F7952	F7952/200	F7952W	F7752	F7752W	F7952P	F7952PW	F7952PL	F7952WPL	F7752P	F7752PW	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	200	120	100	100	120	120	120	120	100	100	
Stryker Physio-Control	LIFEPAK 9 con/with QUICK-COMBO ADAPTER	●	●	●	●	●	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	  F7952 F7952W F7752 F7752W F7952P F7952PW F7752P F7752PW
	LIFEPAK 10	●	●	●	●	●	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	
	LIFEPAK 12	●	●	●	●	●	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	
	LIFEPAK 15	●	●	●	●	●	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	
	LIFEPAK 20	●	●	●	●	●	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	
	LIFEPAK 20E	●	●	●	●	●	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	
	LIFEPAK 500 AED con presa grigia-with grey socket	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
	LIFEPAK 500 AED Biphasic con presa rosa-with pink socket	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	
	LIFEPAK 1000 AED	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	
	LIFEPAK CR PLUS AED	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	
	LIFEPAK EXPRESS AED	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	
Bexen Cardio	REANIBEX-200	●	●	●	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-	  F7952PL F7952WPL
	REANIBEX-300	●	●	●	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-	
	REANIBEX-500	●	●	●	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-	
	REANIBEX-700	●	●	●	(*)	(*)	(1)	(1)	-	-	(*) (1)	(*) (1)	
	REANIBEX-800	●	●	●	(*)	(*)	(1)	(1)	-	-	(*) (1)	(*) (1)	
Cardioline	ELIFE 700	●	●	●	●	●	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	  F7952PL F7952WPL
Comen	S5	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	S8	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
Mindray	BENEHEART D1 (Public / Pro) #	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	BENEHEART D3	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	BENEHEART D6	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
	BENEHEART S&C series #	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
Jousing	iAED-S1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	

F7952PL, F7952WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente - *reduced energy: defibrillator output of 200J is reduced to 50J*

(1) Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico. / *Do not use with fully automatic defibrillators (AED); the pediatric function and/or the energy delivered must be set manually according to the instructions of the specific defibrillator.*

(*) Non per stimolazione - *Not suitable for pace*

Senza riconoscimento automatico del tipo di paziente - *Without automatic patient type recognition*

		F7953	F7953W	F7753	F7753W	F7953P	F7953PW	F7753P	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	120	100	100	120	120	100	
Agilent Hewlett Packard Laerdal Medical	CodeMaster 100 (M2475B), XE (M1724A), XL (M1723A/B), XL+ (M1722A/B) *	●	●	●	●	●	●	●	
	HeartStart 4000 (M5500B) **	●	●	●	●	●	●	●	
	Heartstream/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) **	●	●	●	●	●	●	●	

* con cavo elettrodi a mani libere M1750A/B o M2472A / with hands-free pad cables M1750A/B or M2472A

** con cavo elettrodi a mani libere M3507A / with hands-free pad cables M3507A

		F7954	F7954W	F7754	F7954P	F7754P	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	120	100	120	100	
Schiller	FRED	●	●	●	●	●	
	FRED TELE	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 1002	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 3002	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 2000 EDOS	●	●	●	●	●	
Esaote	MDF SAED	●	●	●	●	●	
	MDF II	●	●	●	●	●	

		F7955	F7955W	F7755	F7755W	F7955P	F7955PW	F7755P	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	120	100	100	120	120	100	
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-22xx series con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	 
	Cardiolife TEC-55xx series con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-56xx series con cavo-with cable K342A (JC-855V)	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-7531 con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-76xx series con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-77xx series con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-8251 con cavo-with cable JC-755V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-83xx series con cavo-with cable K342A (JC-855V)	●	●	●	●	●	●	●	
Welch Allyn	AED-10 (Adattatore pediatrico-paediatric adapter Welch Allyn 002173-U)	●	●	●	●	(2)	(2)	(2)	
	AED-20 (Adattatore pediatrico-paediatric adapter Welch Allyn 002174-U)	●	●	●	●	(2)	(2)	(2)	
	PIC-30, PIC-40, PIC-50	●	●	●	●	●	●	●	
Artema Innomed	CARDIOAID 360B	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIOAID 200B	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIOAID 200	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIOAID 100	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIOAID XL+	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIOAID XL	●	●	●	●	●	●	●	
Artema S&W	CARDIO AID LS	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIO AID MC	●	●	●	●	●	●	●	
	CARDIO AID MC+	●	●	●	●	●	●	●	
Dräger	CARDIOLOG 2000	●	●	●	●	●	●	●	
MRL	LITE	●	●	●	●	●	●	●	
	LIFEQUEST	●	●	●	●	-	-	-	

(2) Nelle applicazioni pediatriche, l'utilizzo degli elettrodi senza l'adattatore riduttore di energia indicato può risultare pericoloso.
In paediatric applications the use of electrodes without the indicated energy reducer adapter can be dangerous.

		F7956	F7956W	F7756	F7956P	F7956PW	F7756P	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		200	200	100	200	200	100	
Schiller	FRED EASY	●	●	●	●	●	●	 
	FRED EASY LIFE	●	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 4000	●	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 5000	●	●	●	●	●	●	
	DEFIGARD DG 6002	●	●	●	●	●	●	

F7956
F7956W
F7756

F7956P
F7956PW
F7756P

		F7957W	F7957PL	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	120	
Cardiac Science	POWERHEART AED - 9200 series	●	●	
	POWERHEART AED G3 - 9300 series (G3 / G3 PLUS / G3 PRO)	●	●	
	FIRSTSAVE AED G3 9300 series	●	●	
Ge	RESPONDER AED	●	●	
	RESPONDER AED PRO	●	●	

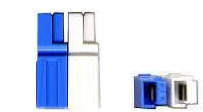
F7957W: Per questo modello la vita del prodotto è 18 mesi dalla data di produzione - *For this model the shelf life is 18 months from manufacturing date*

F7957PL: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente - *reduced energy: defibrillator output of 200J is reduced to 50J*

		F7958	F7958W	F7958P	F7958PW	F7958PL	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	120	120	120	120	
CU Medical Systems, inc	PARAMEDIC CU-ER1	●	●	-	-	●	
	PARAMEDIC CU-ER2, CU-ER3	●	●	(1)	(1)	-	
	PARAMEDIC CU-ER5 con cavo-with cable ER-5 OA03	●	●	(1)	(1)	-	
	LIFEGAIN CU-HD1	●	●	(1)	(1)	-	

F7958PL: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente-*reduced energy: defibrillator output of 150J is reduced to 50J*

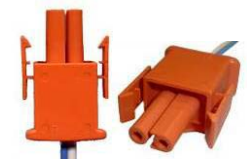
(1) Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico. / *Do not use with fully automatic defibrillators (AED); the pediatric function and/or the energy delivered must be set manually according to the instructions of the specific defibrillator.*

		F7959	F7959W	F7759	F7959P	F7959PL	F7959WPL	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	120	100	120	120	120	
CU Medical Systems, inc	I – PAD NF1200	●	●	●	-	●	●	
Cmos Drake	FUTURA	●	●	●	(1)	-	-	
Amoul® AMBULANC (SHENZHEN) TECH. CO., LTD	i3	-	●	-	-	-	●	

F7959PL, F7959WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente-*reduced energy: defibrillator output of 200J is reduced to 50J*

(1) Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico. / *Do not use with fully automatic defibrillators (AED); the pediatric function and/or the energy delivered must be set manually according to the instructions of the specific defibrillator.*

		F7960W	F7760W	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	100	
Metrax Primedic	HEARTSAVE AED (fino a-up to s/n 73944xxxxxx)	●	●	
	HEARTSAVE AED-M (fino a-up to s/n 73945xxxxxx)	●	●	
	HEARTSAVE 6 (fino a-up to s/n 73946xxxxxx)	●	●	
	HEARTSAVE 6S (fino a-up to s/n 73947xxxxxx)	●	●	
	DEFIMONITOR XD	●	●	

		F7961U	F7961UW	F7961UWXL	F7761U	F7761	F7961P	F7961PW	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		150	150	250	100	100	150	150	
Nihon Kohden	Cardiolife TEC-22xx series con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-55xx series con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-56xx series con cavo-with cable K342B (JC-865V)	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-7531 con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-76xx series con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-77xx series con cavo-with cable JC-765V	●	●	●	●	●	●	●	
	Cardiolife TEC-83xx series con cavo-with cable K342B (JC-865V)	●	●	●	●	●	●	●	

		F7962	F7762	F7962P	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	100	120	
Marquette GE	MARQUETTE 1250 FIRST RESPONDER	●	●	●	
	MARQUETTE 1500 FIRST RESPONDER	●	●	●	
	MARQUETTE RESPONDER 2000 (con cavo adattatore-with adapter cable)	●	●	●	
	MARQUETTE RESPONDER 3000 (con cavo adattatore-with adapter cable)	●	●	●	
Esaote	MDF	●	●	●	
	MDF PLUS	●	●	●	

		F7963	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	
Nihon Kohden	TEC-8250 con cavo-with cable L200	●	
	TEC-8251 con cavo-with cable L200	●	

		F7964W	F7964PW	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		130	130	
Weinmann	MEDUCORE EASY	●	-	
	MEDUCORE STANDARD	●	(1)	

(1) Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico. / Do not use with fully automatic defibrillators (AED); the pediatric function and/or the energy delivered must be set manually according to the instructions of the specific defibrillator.

		F7965	F7965P	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		100	100	
Corpuls	CORPULS 3	●	●	
	CORPULS 3 SLIM – solo con cavo 04326.0BA / only with cable 04326.0BA	●	●	
	CORPULS 1 - solo con cavo 04326.0BA / only with cable 04326.0BA	●	●	

		F7965/PLUSNG	F7965W/NG	F7965PW/NG	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		135	135	135	
Corpuls	CORPULS 3	●	●	●	
	CORPULS 3 SLIM – connessione diretta o con cavo 04326.0BA / direct connection or with cable 04326.0BA	●	●	●	
	CORPULS 1 – connessione diretta o con cavo 04326.0BA / direct connection or with cable 04326.0BA	●	●	●	

		F7966W	F7966WPL		
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		150	150		
Defibtech	DDU – 100 Lifeline AED	●	●		
	DDU – 120 Lifeline AUTO AED	●	●		

F7966WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente-reduced energy: defibrillator output of 150J is reduced to 50J

		F7967	F7967W	F7967P	F7967PW		
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		200	200	200	200		
Schiller	FRED easyport, FRED easyport plus	●	●	●	●		
	DEFIGARD HD-7, DEFIGARD Touch 7	●	●	●	●		
	ARGUS PRO LifeCare 1 & 2	●	●	●	●		
	CARDIOVIT AT-101 Easy	●	●	●	●		
PHILIPS	TEMPUS LS	●	●	●	●		

Gli elettrodi sono senza RFID per il riconoscimento automatico della scadenza (funzionalità presente su DEFIGARD TOUCH 7)
Electrodes are provided without the RFID system for automatic recognition of the expiry date (features available on DEFIGARD TOUCH 7)

		F7969W	F7969PW		
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	120		
Mediana	HeartOn AED A10	●	●		

		F7981	F7981P	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		200	200	
GE	RESPONDER 3000 (attacco diretto-direct connection)	●	●	
	RESPONDER 2000 (attacco diretto-direct connection)	●	●	
	RESPONDER 1100 (attacco diretto-direct connection)	●	●	
	CARDIOSERV (attacco diretto-direct connection)	●	●	
	DASH RESPONDER (attacco diretto-direct connection)	●	●	

		F7986	F7986W	F7986P	F7986PW	F7986UW	F7986UW-D700	F7786UW-D700	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		180	180	180	180	180	180	100	
Mediana	D500	●	●	●	●	-	-	-	
	HEARTON AED A15	-	-	-	-	●	-	-	
	D700	-	-	-	-	-	●	●	
Tecno-Gaz	TECNOHEART PLUS	-	-	-	-	●	-	-	

F7986 - F7986W - F7986P - F7986PW - F7986UW-D700 - F7786UW-D700 : Non commercializzabili in Italia - Not for sale in Italy

		F7987W	F7987PW	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	120	
Zoll Medical Corp	AED PLUS	●	●	
	AED PRO	●	●	
	ZOLL AED 3	●	●	
	R Series (#)	●	●	
	X Series (*)	●	●	

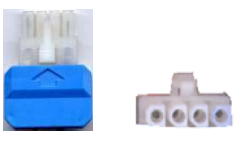
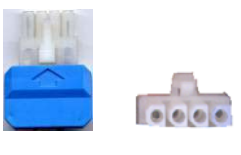
F7987W-F7987PW: senza funzione CPR (risposta alle compressioni e metronomo) - *without CPR function (feedback on compression and pace metronome)*

(#) Con cavo terapia CPR-D: 8000-000863-40 o adattatore: 8009-0020 (per cavi terapia: 8009-0749 o 8009-0750) - *With therapy cable CPR-D: 8000-000863-40 or adapter: 8009-0020 (for therapy cables: 8009-0749 or 8009-0750)*

(*) Con cavo terapia CPR-D: 8300-000831-40 o adattatore: 8009-0370 (per cavo terapia: 8300-000676) - *With therapy cable CPR-D: 8300-000831-40 or adapter: 8009-0370 (for therapy cable: 8300-000676)*

		F7989UW	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	
Nihon Kohden	Cardiolife AED 2100K	●	
	Cardiolife AED 2150K	●	
	Cardiolife AED 2151K	●	
	Cardiolife AED 2152K	●	

Non commercializzabile in Francia, Germania, Gran Bretagna - *Not for sale in France, Germany, United Kingdom.*

		F7992U	
Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120	
Radian	Heart Guardian AED HR-501	●	

		F7970	F7970P	
Laerdal Medical	CAVI-CABLES LAERDAL MEDICAL REF. 945004 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: MRx, FR (serie-series), XL) REF. 920601 – REF. 920602 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: HeartStart3000) REF. 920620 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: HeartStart911)	•	•	
			F7971	
Physio-Control	CAVI-CABLES Physio-Control REF 3011030-00 (11110-000052) e-and REF 3011030-01 (11110-000053) (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: LIFEPAK 12)		•	
		F7972	F7972P	
Marquette GE	CAVO-CABLE GE MEDICAL SYSTEMS REF. 22338301 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., with the following defibrillators: GE CARDIOSERV, ESAOTE MDF)	•	•	
Esaote				

OLTRE AI MODELLI EURODEFIPADS DI CUI SOPRA, SONO DISPONIBILI ALTRI MODELLI DI ELETTRODI DESTINATI ALLA SOLA STIMOLAZIONE CARDIACA
BESIDES EURODEFIPADS MODELS, ADDITIONAL ELECTRODES HAVE BEEN INTENDED FOR EXTERNAL CARDIAC STIMULATION

		F7951/STIM	F7951P/STIM	
		Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):	120	
Zoll Medical Corp	ZOLL serie M (solo versioni con stimolatore) M SERIES (pacer versions only)		●	●

		F7955/STIM		
		Lunghezza del cavo (cm) / Cable length (cm):		120
Nihon Kohden	TEC-7731 con cavo-with cable JC-755V			●
	TEC-5531 con cavo-with cable JC-755V			●
Innomed	CARDIOAID 200B		●	

		F7973	
Physio-Control	CAVO-CABLE Physio-Control REF. 802905-03		

FIAB garantisce la compatibilità degli elettrodi con i modelli di defibrillatori sopra indicati; si raccomanda comunque di verificare preventivamente la compatibilità con il dispositivo in uso, controllando almeno il corretto inserimento del connettore nella presa dell'apparecchio, del cavo paziente o di adattatori eventualmente utilizzati. Ove non specificato diversamente, l'utilizzo di adattatori o cavi di estensione potrebbe compromettere la funzionalità degli elettrodi. Seguire le indicazioni dei produttori dei defibrillatori per quanto riguarda il posizionamento e la terapia, specialmente su pazienti pediatrici. I marchi e i nomi commerciali presenti nel documento sono proprietà dei rispettivi produttori.

FIAB guarantees the compatibility of the electrodes with the above mentioned defibrillator models; in any case it is recommended to check beforehand the compatibility with the device in use, checking at least the correct insertion of the connector in the socket of the device, of the patient cable or of any adapters used. Unless otherwise specified, the use of adapters or extension cables could compromise the functionality of the electrodes. Follow the defibrillators manufacturer's instructions regarding the placement and therapy, especially on pediatric patients. The brands and commercial names in this document are property of their corresponding manufacturers.