

MA0RA303 - KIT ANTIDECÚBITO CON ESTERA Y COMPRESOR CON AJUSTE

USO PREVISTO

La línea de kits de compresores y colchones está diseñada para la prevención y tratamiento de úlceras de decúbito que pueden ocurrir en todas aquellas situaciones que requieren una larga estancia hospitalaria y/o domiciliaria.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el uso adecuado del dispositivo, consulte cuidadosamente el siguiente manual
- Para el uso adecuado del dispositivo siempre consulte a su médico o terapeuta
- Mantenga el producto envasado alejado de cualquier fuente de calor, ya que el embalaje está hecho de cartón.
- La vida útil del dispositivo está determinada por el desgaste de piezas no reparables y/o reemplazables.
- Siempre preste atención a la presencia de niños
- El usuario y/o paciente notificará cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

INSTALACIÓN

Desembale el dispositivo para verificar que no ha sufrido ningún daño durante el envío. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

1. Coloque el colchón inflable encima de un colchón normal para que los accesorios para conectar las mangueras de aire se coloquen hacia el pie de la cama.
2. Cuelgue el compresor al pie de la cama usando los ganchos en la parte posterior del compresor, o colóquelo sobre una superficie plana
3. Conecte las dos mangueras de conexión a los conectores del compresor y del colchón
4. Conecte el enchufe a la toma de corriente
5. Encienda el interruptor situado en el lado derecho del compresor.

NOTA:

1. Compruebe que la tensión del sistema eléctrico es adecuada para el compresor
2. El zócalo también puede servir como un interruptor para desconectar el aparato

¡ATENCIÓN!

- La bomba solo se puede aplicar a la alfombra recomendada por el fabricante.
- No lo use para ningún otro propósito. (Elemento aplicado: alfombrilla de aire)
- Es recomendable colocar el colchón con elementos intercambiables encima de un colchón con una altura de no menos de 5 cm.
- Compruebe que no haya curvas o aplastamientos que obstruyan el paso del aire.
- No fume en o cerca de la bomba.
- Mantenga la bomba alejada de superficies calientes.
- Riesgo de explosión si se utiliza en presencia de anestésicos inflamables.

Algunos consejos de instalación:

Después de la instalación, enrolle cualquier cable que se deje libre para evitar tropezar. El dispositivo debe colocarse en un lugar que sea totalmente accesible para el usuario o los médicos.

ANTES DE CADA USO

Compruebe el montaje correcto del dispositivo con especial atención a la conexión de las tuberías entre el colchón y el compresor.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Colchón

Limpie el colchón regularmente con detergente neutro o alcohol. La esterilización en caliente o con vapor no es posible.

Bomba

Limpie la bomba regularmente con detergente suave o alcohol. No abra la carcasa de la bomba - riesgo de electrocución. No moje ni sumerja la bomba en ningún líquido

CONDICIONES DE ELIMINACIÓN


En caso de eliminación del dispositivo, nunca utilice los sistemas normales de entrega de residuos sólidos municipales. En su lugar, se recomienda desechar el dispositivo a través de las islas ecológicas municipales comunes para las operaciones de reciclaje planificadas de los materiales utilizados.

Advertencias para la correcta eliminación del producto según la Directiva Europea 2012/19/UE:



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales. Se puede entregar en los centros de recogida selectiva adecuados establecidos por las administraciones municipales, o en los minoristas que prestan este servicio. La eliminación del producto por separado evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de su eliminación inadecuada y permite recuperar los materiales que lo componen

para obtener un importante ahorro de energía y recursos. Para subrayar la obligación de desechar los equipos electromédicos por separado, el producto lleva la marca del contenedor de basura móvil tachado.

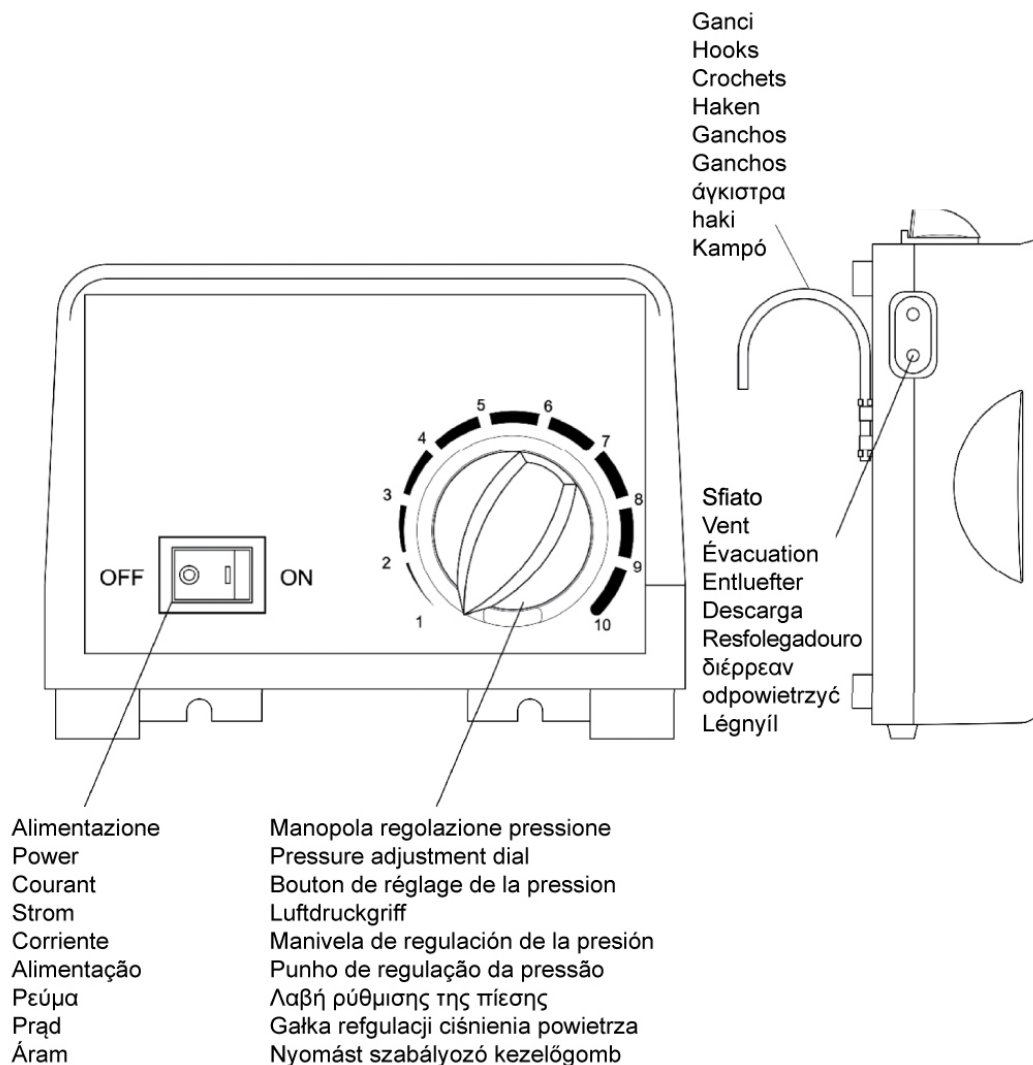

REF


LOT

MA0RA303

Vea la etiqueta debajo del dispositivo

(01)08051882210393(10)xxxxxx

Compressore antidecubito con materasso a bolle

 RAM Apparecchi Medicali srl
Via Casaregis 19/25r – 16129 Genova – Italy
+39.010.5761476 - info@anteamed.it

