

POLSKI

Ciśnieniomierz nadgarstkowy - MODEL KD-735 (SFIGMOMANOMETR ELEKTRONICZNY)

Instrukcja obsługi

WAŻNE INFORMACJE
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Dziękujemy za zakup ciśnieniomierza nadgarstkowego. Instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego wglądu.

NATURALNE WAHANIA CIŚNIENIA KRWI

Na ciśnienie krwi wpływa wiele czynników, takich jak emocje, stres, pozycja ciała oraz aktywność fizyczna – np. jedzenie, picie, palenie papierosów, a nawet sam pomiar ciśnienia krwi. W związku z tym rzadko uzyskuje się identyczne wyniki pomiarów. Ciśnienie krwi zmienia się przez całą dobę. Zazwyczaj wzrasta w ciągu dnia i osiąga najwyższy poziom, gdy jesteśmy aktywni i nie śpimy. Wieczorem spada, osiągając najniższy poziom między północą a 3 rano, kiedy większość osób śpi.

Biorąc to pod uwagę, zaleca się mierzenie ciśnienia o tej samej porze każdego dnia. Zbyt częste wykonywanie pomiarów może zakłócić przepływ krwi i doprowadzić do urazu, dlatego zawsze należy odczekać co najmniej 60-90 sekund między pomiarami, aby krążenie mogło wrócić do normy.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- 1 × Ciśnieniomierz z przymocowanym mankietem nadgarstkowym
- 1 × Instrukcja obsługi
- 1 × Torebka plastikowa

WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA



