



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Date issued: 202505010 File No: LF/CE-04-14 A/2



1



2



3




4



5



6

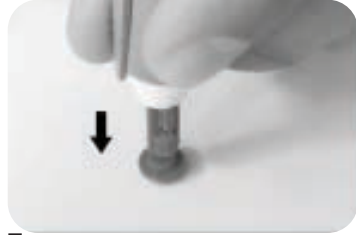

7



8

## FRANÇAIS

### STYLOS AUTOPIQUEURS

#### Nom du dispositif :

Dispositif de piqûre

#### Modèle:

LDC, LDE, LDF

#### Principe et utilisation prévue:

Facilite la tâche de la lancette pour le prélèvement de sang périphérique au bout du doigt ou du pied pour les tests de glycémie ou autres tests utilisant une petite quantité de sang. Il s'agit d'un dispositif non invasif qui n'entre pas en contact avec le sang, il ne fait qu'un bref contact avec la surface de la peau pendant quelques secondes. Ce dispositif de piqûre n'est pas stérile.

#### Attention:

1. L'autopiqueur est destiné à un seul patient. Ne pas le partager avec d'autres personnes, y compris les membres de votre famille ! Ne pas l'utiliser sur plusieurs patients !
2. Ne pas réutiliser la lancette, toujours utiliser une nouvelle lancette stérile pour les tests.
3. Faire preuve de prudence lorsque l'aiguille de la lancette est exposée, notamment en retirant la lancette usagée de l'appareil et en la jetant.
4. Un avis à l'utilisateur et/ou au patient que tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside.

#### Durée de vie :

5 ans ou 5 000 fois, le premier des deux prévalant.

#### Mode d'emploi :

Le dispositif est réutilisable, mais il est impératif de le maintenir propre. Désinfectez le capuchon du dispositif de prélèvement avec une lingette alcoolisée ou un coton avant utilisation. Lavez-vous également les mains à l'eau chaude savonneuse, rincez-les abondamment et séchez-les soigneusement. Se réchauffer les doigts favorise la circulation sanguine.

1. Le dispositif est réutilisable. Maintenez-le propre. Désinfectez le capuchon du dispositif de prélèvement avec une lingette alcoolisée ou un coton avant utilisation. Dévissez le capuchon.
2. Dévisser le capuchon de l'autopiqueur.
3. Introduire une nouvelle lancette stérile dans le porte-lancette. Pousser fermement jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement en place.
3. Dévisser le capuchon de protection de la lancette et conservez le capuchon pour une utilisation ultérieure. Remettez le capuchon de l'autopiqueur en place.
4. Régler le niveau de piqûre en tournant l'embout réglable jusqu'à ce que le chiffre soit aligné avec la flèche. Pour sélectionner la profondeur la plus appropriée :  
1 à 2 pour une peau douce ou fine  
3 pour une peau moyenne  
4-5 pour les peaux épaisses ou calleuses
5. Tirer lentement le contrôle de relâchement. Quand on entend un clic, indiquant que l'autopiqueur est maintenant chargé, le dispositif est prêt à être utilisé.
6. Tenir l'autopiqueur fermement contre le bout du doigt. Appuyer sur le déclencheur. Mettre l'autopiqueur de côté et effectuer le test de glycémie en suivant les instructions du lecteur de glycémie.
7. Après utilisation, retirer le capuchon de l'autopiqueur. Pousser l'extrémité exposée de la lancette dans son capuchon de protection.
8. Faire glisser l'éjecteur de lancette vers l'avant et jeter la lancette usagée dans un récipient approuvé. Jeter la lancette usagée conformément à la réglementation de sécurité de votre pays. Remettre le capuchon de l'autopiqueur en place.

#### Caractéristiques des performances des dispositifs :

Le produit se compose d'un corps principal, d'un mécanisme de largage et d'un ensemble de réglage.

#### Transport et stockage :

Des moyens de transport communs sont disponibles pour le transport, veuillez éviter les fortes pressions, l'eau de pluie, la neige et les collisions. Les produits emballés doivent être stockés dans une pièce bien ventilée et exempte de toute substance toxique, nocive et corrosive.

#### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

	Représentant autorisé dans l'Union européenne
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	Date de fabrication
	Fabricant
	Code produit
	Numéro de lot
	Limite de température
	Limite d'humidité
	À conserver dans un endroit frais et sec
	Consulter les instructions d'utilisation
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Dispositif médical
	Identifiant unique de l'appareil
	Importé par

GIMA 23919

LDE

Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd  
No.1 Shuangshan Sanjian Road, Zhangqiu,  
Jinan City, 250200, Shandong  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Made in China

Linkfar Healthcare GmbH  
Niederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf,  
Germany

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

