

die Epidermis des Patienten nicht zu verletzen.

Sterilisieren: autoklavierbar bei 138°C

| | |
|---|--|
|  | An einem kühlen und trockenen Ort lagern |
|  | Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern |
|  | Gebrauchsanweisung beachten |
| REF | Erzeugniscode |
| LOT | Chargennummer |
|  | Nicht steril |
|  | Hersteller |
| CE | Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 |
|  | Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen |
| MD | Medizinprodukt |
|  | Herstellungsdatum |
| EC REP | Autorisierter Vertreter in der EG |
|  | Eingeführt von |
| UDI | Eindeutige Gerätekenung |

DEUTSCH

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Die Klängen der Verbandschere werden in 2Cr13 Edelstahl gefertigt, der Griff ist aus PP.

Die Klängen dieser Schere sind gefräst, zum Schneiden von Kleidung, Verbandmull und Bandagen.

Die Verbandschere eignet sich zum:

- Schneiden von Verbandmull
- Aufschneiden von schon angelegten Bandagen

Achtung

Wir weisen darauf hin, dass die Schere Verletzungen verursachen kann, wenn diese nicht mit Sorgfalt angewandt wird.

Bitte bei der Anwendung Sorgfalt und Vorsicht walten lassen.

Bewahren Sie die Schere an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen, auf.

Nach jedem Gebrauch muss die Schere sorgfältig gereinigt werden.

Halten Sie die Schere in geschlossener Stellung, wenn diese nicht verwendet wird.

Instrumente, die Anzeichen von Verschleiß aufweisen, müssen sofort beseitigt werden.

Anwendung

Die Schere während der Anwendung fest mit der Hand ergreifen, den Schneidevorgang der Bandage an der Vorderseite des Körpers des Patienten beginnen; darauf achten

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.



**FORBICI PER BENDE
BANDAGE SCISSORS
CISEAUX À BANDAGES
TIJERAS PARA VENDAS
VERBANDSCHERE
TESOURAS PARA LIGADURAS**

**GIMA 20560 - GIMA 20570 - GIMA 20571
GIMA 20572 - GIMA 20573 - GIMA 20574
GIMA 20580 - GIMA 20581 - GIMA 20582
GIMA 20583 - GIMA 20584**



EMSRUN GROUP
8-7 Huide Road, Huishan Area, Wuxi, 214000
Jiangsu, P.R. China
Made in China



CR-SC01 4.7" - CR-SC01 6.5" - CR-SC01 7.5"



SUNGO Cert GmbH
Harffstr. 47,40591 Düsseldorf, Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060
Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

