

ser utilizadas.
Os instrumentos que apresentarem sinais de desgaste devem ser imediatamente eliminados.

Instruções de utilização

Segure firmemente as tesouras durante a utilização e efectue o corte na parte da frente do corpo. Não corte pelo lado e tenha cuidado para não ferir a epiderme do paciente.

Esterilização: autoclavável a 138°C

	Armazenar em local fresco e seco
	Guardar ao abrigo da luz solar
	Consulte as instruções de uso
	Código produto
	Número de lote
	Não estéril
	Fabricante
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745
	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	Dispositivo médico
	Data de fabrico
	Representante autorizado na União Europeia
	Importado por
	Identificador exclusivo do dispositivo

PORTUGUÊS

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

As lâminas das tesouras para ligaduras são fabricadas em aço inoxidável 2Cr13 e a pega é de PP.
As lâminas destas tesouras são serrilhadas para cortar vestuário, gaze e ligaduras.

As tesouras para ligaduras são indicadas para:

- Cortar gaze de utilização médica
- Cortar ligaduras já enfaixadas

Avisos

Recordamos que as tesouras podem causar ferimento se não forem manuseadas com cuidado.

Assim, proceda com cuidado e prudência durante a sua utilização.

Escolha um lugar seguro fora do alcance do pessoal não autorizado para guardar as tesouras.

Limpe as tesouras após cada utilização para retirar eventuais resíduos.

Mantenha-as na posição fechada quando não estiverem a

FORBICI PER BENDE BANDAGE SCISSORS CISEAUX À BANDAGES TIJERAS PARA VENDAS VERBANDSCHERE TESOURAS PARA LIGADURAS

GIMA 20560 - GIMA 20570 - GIMA 20571
GIMA 20572 - GIMA 20573 - GIMA 20574
GIMA 20580 - GIMA 20581 - GIMA 20582
GIMA 20583 - GIMA 20584



EMSRUN GROUP
8-7 Huide Road, Huishan Area, Wuxi, 214000
Jiangsu, P.R. China
Made in China



CR-SC01 4.7" - CR-SC01 6.5" - CR-SC01 7.5"



SUNGO Cert GmbH
Harffstr. 47,40591 Düsseldorf, Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060
Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

