



(FI) Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.



(FI) Saatavilla olevat koo: 4 & 7 mm




(FI) Steriili. Vain KERTAKÄYTTÖÖN.
Jos useita koepaloja tai näytteitä otetaan samalta potilaalta, on käytettävä uutta laitetta joka kerta.
→ Älä steriloi uudelleen tai käytä uudelleen infektioriskin vuoksi.
→ Älä käytä, jos steriili sisäpakkaus on vahingoittunut tai vaurioitunut.

1.

(FI) Rengaskyretti on väline kudospalan poistamiseen, kuten pinnallisten leesioiden poistoleikkaus.


2. a.

(FI) Rengaskyretin käyttöön suositellaan kahta tekniikkaa. Valitse sopivin tekniikka toimenpiteen mukaan.

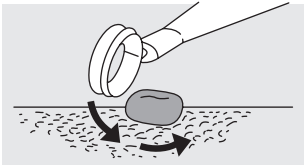


b.

(FI) Ohjaa varovasti rengaskyrettä, jotta kudospala voidaan poistaa yhdellä viilolla.

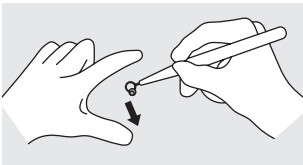

a.i.
(FI) Tekniikka 1, joka on yleisempi. Venytä ihoa toisen käden sormilla. Pidä rengaskyretti peukalon, etusormen ja keskisormen välissä. Aseta rengaskyretin terävä puoli leesion reunalle.

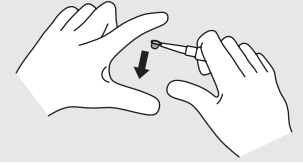

a.ii.
(FI) Tekniikka 2, joka voi olla vähentyneen tarkkuuden vuoksi sopivampi kovalle tai paksulle iholle. Pidä rengaskyrettä etusormen distaalisessa poimussa rengaskyrettä pitävän käden sormien tukemana. Aseta rengaskyretin terävä puoli leesion reunalle. Aseta peukalot pitämään ympäröivä iho paikallaan.

3.



(FI) Steriloinut etyleenioksidilla:
sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5,
D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.

(FI) Ks. pakkauksesta tai kotelosta:



5.

(FI) GlaxoSmithKline Oy, Piispansilta/Biskopsbro
9A, PL/PB 24, 02230 Espoo/Esbo, SUOMI/
FINLAND.