



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**PROCTOSCOPIO STERILE MONOUSO**  
**STERILE PROCTOSCOPE FOR SINGLE USE**  
**RECTOSCOPE STÉRILE À USAGE UNIQUE**  
**PROCTOSCOPIO ESTÉRIL DESECHABLE**  
**PROCTOSCÓPIO ESTÉRIL PARA UTILIZAÇÃO ÚNICA**  
**STERILES PROKTOSKOP FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH**  
**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**STERYLNY REKTOSKOP JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**  
**STERILNÍ PROKTOSKOP NA JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ**  
**STERILT PROKTOSKOP FÖR ENGÅNGSBRUK**  
**STERIILI KERTAKÄYTTÖINEN PROKTOSKOOPPI**  
**STERILNI PROKTOSKOP ZA ENKRATNO UPORABO**  
**STERILNÝ PROKTOSKOP NA JEDNO POUŽITIE**  
**PROCTOSCOPIUM STERILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ**  
**STERIELE PROTOSCOOP VOOR EENMALIG GEBRUIK**  
**STERILNI PROKTOSKOP ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU**  
**EGYSZER HASZNÁLATOS, STERIL PROKTOSZKÓP**  
**STERILT PROKTOSKOP TIL ENGANGSBRUG**  
**СТЕРИЛЕН ПРОКТОСКОП ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА**  
**STERILUS VIENKARTINIS PROKTOSKOPAS**  
**STERILS PROKTOSKOPS VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI**  
**STERIILNE PROKTOSKOOP ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS**

منظار مستقيم معقم للاستخدام الواحد

## Gima 25957



Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd. No.18  
Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang  
JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Made in China



**723112**



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße, 80, 20537, Hamburg, Germany  
Tel.0049-40-2513175



**Medicare AG,**

Hauptstr. 51 5024 Küttigen, Schweiz  
CHRN-AR-20002506



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**STERILE**

**CE 0123**



## FRANÇAIS

**Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.**

### Nom du produit :

Rectoscope stérile à usage unique

### Utilisation prévue :

La destination d'usage principale du rectoscope stérile à usage unique est l'inspection et la chirurgie des lésions anales.

Utilisateurs prévus, Le rectoscope stérile à usage unique est utilisé par des docteurs et de l'infirmier formés.

### Composition structurelle :

Le rectoscope stérile à usage unique est composé d'un tuyau externe, d'un tuyau interne, d'un connecteur à une source lumineuse.

### Indications :

Le produit est un instrument commun pour l'examen et le traitement de maladies ano-rectales.

### Contre-indications :

aucune

### Types de patients :

patients affectés de maladies ano-rectales.

### Caractéristiques de performance :

produit stérile à usage unique

### Mode d'emploi :

Ouvrir l'emballage primaire, placer le tuyau interne dans le tuyau externe, les introduire ensemble dans le rectum, extraire le tuyau interne, connecter la source lumineuse puis observer l'état du patient.

### Risques résiduels et effets secondaires :

aucune

### Bénéfices cliniques :

Le rectoscope stérile à usage unique permet au personnel médical de contrôler et d'opérer sur des patients affectés de maladies ano-rectales.



### Attention :

- A. Le produit est à usage unique. La réutilisation du produit peut provoquer une infection croisée.
- B. Le produit a été stérilisé par un traitement à l'oxyde d'éthylène, valable pendant cinq ans. Il est interdit de l'utiliser après l'échéance.
- C. Lors de l'utilisation, introduire lentement le produit dans le rectum, stopper l'utilisation si le patient souffre.
- D. Ne pas utiliser le produit si le petit emballage est endommagé ou a été accidentellement ouvert avant l'utilisation ou s'il contient des corps étrangers.
- E. L'utilisation du produit doit être conforme aux exigences des normes d'utilisation pertinentes et des lois et réglementations

pertinentes du département médical ; le produit doit être utilisé par des docteurs ou du personnel infirmier formés. En cas d'anomalie physique de l'opérateur ou de l'utilisateur au cours de l'utilisation, celle-ci doit être traitée à temps, conformément aux normes médicales.

- F. Si un problème concernant la qualité est constaté pendant l'utilisation, stopper immédiatement l'utilisation et nous en informer dès que possible.
- G. Éliminer après l'utilisation. Après utilisation, les produits doivent être collectés, transportés, stockés et éliminés de manière à garantir leur innocuité pour la santé humaine et l'environnement. Le produit peut également être éliminé conformément aux réglementations médicales locales en matière d'élimination des déchets.

### Stockage :

Le produit doit être stocké dans une pièce ne contenant aucun gaz corrosif et bien aérée ; le produit doit être doté d'une protection adéquate.

### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

Indice dei simboli - Symbol index - Index des symboles  
 - Índice de símbolos- índice de símbolo - Symbolindex -  
 Ευρετήριο συμβόλων - Indeks symboli - Index symbolů  
 - Symbol index - Symboli-indeksi - Indeks simbolov - Index  
 symbolov - Index de simbol - Symbol index - Indeks simbo-  
 la - Szimbólum index - Symbolindeks - Индекс на символа  
 - Simbolių rodyklė - Simbolu rādītājs - Šimbolite indeks




شي الوبوموس تارشوم -


	<p>IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture  FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación  PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum  GR - Ημερομηνία παραγωγής PL - Data produkcji CZ - Datum výroby  SE - Tillverkningsdatum FI - Valmistuspäivämäärä  SI - Datum proizvodnje SK - Dátum výroby RO - Data fabricației  NL - Productiedatum HR - Datum proizvodnje  HU - Gyártás dátuma DK - Fabrikationsdato  BG - Fabrikationsdato LT - Pagaminimo data  LV - Izgatavošanas datums EE - Valmistamise kuupäev  AR - تاريخ التصنيع</p>
---	--


	<p><b>IT</b> - Fabbricante <b>GB</b> - Manufacturer <b>FR</b> - Fabricant <b>ES</b> - Fabricante <b>PT</b> - Fabricante <b>DE</b> - Hersteller <b>GR</b> - Παραγωγός <b>PL</b> - Producent <b>CZ</b> - Výrobce <b>SE</b> - Tillverkare <b>FI</b> - Valmistaja <b>SI</b> - Proizvajalec <b>SK</b> - Výrobca <b>RO</b> - Producător <b>NL</b> - Fabrikant <b>HR</b> - Proizvođač <b>HU</b> - Gyártó <b>DK</b> - Fabrikant <b>BG</b> - Fabrikant <b>LT</b> - Gamintojas <b>LV</b> - Ražotājs <b>EE</b> - Tootja <b>الشركة المصنعة - AR</b></p>
	<p><b>IT</b> - Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> - Keep away from sunlight <b>FR</b> - À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> - Conservar al amparo de la luz solar <b>PT</b> - Guardar ao abrigo da luz solar <b>DE</b> - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern <b>GR</b> - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία <b>PL</b> - Przechowywać z dala od światła słonecznego <b>CZ</b> - Skladujte mimo sluneční světlo <b>SE</b> - Skyddas från solljus <b>FI</b> - Säilytä auringonvalolta suojaassa <b>SI</b> - Hraniti zaščiteno pred sončno svetlobo <b>SK</b> - Skladujte mimo slnečného svetla <b>RO</b> - A se păstra ferit de razele soarelui <b>NL</b> - Afgeschermd van zonlicht opslaan <b>HR</b> - Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti <b>HU</b> - Napfénytől védve tárolandó <b>DK</b> - Må ikke udsættes for sollys <b>BG</b> - Må ikke udsættes for sollys <b>LT</b> - Saugoti nuo saulės spindulių <b>LV</b> - Uzglabāt prom no saules gaismas <b>EE</b> - Hoida eemal päikesevalgusest <b>يحتفظ بعيداً عن ضوء الشمس - AR</b></p>
	<p><b>IT</b> - Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato <b>GB</b> - Don't use if package is damaged <b>FR</b> - Ne pas utiliser si le colis est endommagé <b>ES</b> - No usar si el paquete está dañado <b>PT</b> - Não use se o pacote estiver danificado <b>DE</b> - Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist <b>GR</b> - Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη <b>PL</b> - Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone <b>CZ</b> - Nepoužívejte, pokud je obal poškozen <b>SE</b> - Använd inte en förpackning som är skadad <b>FI</b> - Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut <b>SI</b> - Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana <b>SK</b> - Nepoužívajte, ak je obal poškodený <b>RO</b> - A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat <b>NL</b> - Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is <b>HR</b> - Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno <b>HU</b> - Ne használja, ha a csomagolás sérült <b>DK</b> - Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget <b>BG</b> - Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget <b>LT</b> - Nenaudokite, jei pakuotė pažeista <b>LV</b> - Nelietot, ja iepakojums ir bojāts <b>EE</b> - Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud <b>لا تستخدم في حالة تلف الحزمة - AR</b></p>

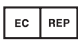

	<p><b>IT</b> - Importato da <b>GB</b> - Imported by <b>FR</b> - Importé par <b>ES</b> - Importado por <b>PT</b> - Importado por <b>DE</b> - Eingeführt von <b>GR</b> - Εισαγωγή από <b>PL</b> - Importowane przez <b>CZ</b> - Dovezeno uživatelem <b>SE</b> - Importerad av <b>FI</b> - Tuojja <b>SI</b> - Uvozil <b>SK</b> - Dovážal <b>RO</b> - Importat de <b>NL</b> - Geïmporteerd door <b>HR</b> - Uvezeno od strane <b>HU</b> - Importált <b>DK</b> - Importeret af <b>BG</b> - Importeret af <b>LT</b> - Importavo <b>LV</b> - Importēja <b>EE</b> - Importija <b>مستورد عن طريق - AR</b></p>
	<p><b>IT</b> - Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> - Keep in a cool, dry place <b>FR</b> - À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> - Conservar en un lugar fresco y seco <b>PT</b> - Armazenar em local fresco e seco <b>DE</b> - An einem kühlen und trockenen Ort lagern <b>GR</b> - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον <b>PL</b> - Przechowywać w suchym miejscu <b>CZ</b> - Skladujte na větraném a suchém místě <b>SE</b> - Förvara på svalt och torr ställe <b>FI</b> - Säilytä kuivassa ja viileässä <b>SI</b> - Hraniti na suhem in hladnem mestu <b>SK</b> - Skladujte na chladnom a suchom mieste <b>RO</b> - A se păstra într-un loc răcoros și uscat <b>NL</b> - Koel en droog opslaan <b>HR</b> - Čuvati na hladnom i suhom mjestu <b>HU</b> - Száraz, hűvös helyen tárolandó <b>DK</b> - Opbevares køligt og tørt <b>BG</b> - Opbevares køligt og tørt <b>LT</b> - Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje <b>LV</b> - Uzglabāt vēsā, sausā vietā <b>EE</b> - Hoida jahedas ja kuivas kohas <b>يحتفظ في مكان بارد وجاف - AR</b></p>
	<p><b>IT</b> - Non ri-sterilizzare <b>GB</b> - Do not re-sterilize <b>FR</b> - Ne pas re-stériliser <b>DE</b> - Nicht erneut sterilisieren <b>ES</b> - No reesterilizar <b>PT</b> - Não reesterilize <b>GR</b> - Μην αποστειρώνετε ξανά <b>BG</b> - Не стерилизирайте повторно <b>CZ</b> - Nesterilizujte znovu <b>DA</b> - Må ikke gensteriliseres <b>EE</b> - Ärge steriliseerige uuesti <b>FI</b> - Älä steriloï uudelleen <b>HR</b> - Nemojte ponovno sterilizirati <b>HU</b> - Ne sterilizálja újra <b>LT</b> - Nesterilizuoti pakartotinaï <b>LV</b> - Nesterilizēt atkārtoti <b>NL</b> - Niet opnieuw steriliseren <b>PL</b> - Nie sterylizować ponownie <b>RO</b> - Nu reesterilizați <b>SK</b> - Nesterilizujte znova <b>SI</b> - Ne sterilizirajte ponovno <b>SV</b> - Sterilisera inte om</p>

	<p><b>IT</b> - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> - Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) <b>ES</b> - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente <b>PT</b> - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente <b>DE</b> - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen <b>GR</b> - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις) <b>PL</b> - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi <b>CZ</b> - Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití <b>SE</b> - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga <b>FI</b> - Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti <b>SI</b> - Pozor: Preberite in skrbno sledite navodilom (opozorilom) za uporabo <b>SK</b> - Pozor: Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na použitie (výstraž) <b>RO</b> - Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare <b>NL</b> - Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen) <b>HR</b> - Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu <b>HU</b> - Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket) <b>DK</b> - Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt <b>BG</b> - Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt <b>LT</b> - Dėmesio: perskaitykite ir atidžiai laikykitės naudojimo instrukcijų (įspėjimų). <b>LV</b> - Uzmanību: Izlasiet un uzmanīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas (brīdinājumus) <b>EE</b> - Tähelepanu! Lugege kasutusjuhised (hoiatused) läbi ja järgige neid hoolikalt <b>AR</b> - الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بناية</p>
	<p><b>IT</b> - Sterilizzato con ossido di etilene <b>GB</b> - Sterilized using ethylene oxide <b>FR</b> - Stérilisé à l'oxyde d'éthylène <b>ES</b> - Esterilizado con óxido de etileno <b>PT</b> - Esterilizado com óxido de etileno <b>DE</b> - Sterilisiert mit Ethylenoxid <b>GR</b> - Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο <b>PL</b> - Sterylizowane tlenkiem etylenu <b>CZ</b> - Sterilizované etylenoxidem <b>SE</b> - Steriliserad med etylenoxid <b>FI</b> - Steriloitu etyleenioksidilla <b>SI</b> - Sterilizirano z etilen oksidom <b>SK</b> - Sterilizované etylénoxidom <b>RO</b> - Sterilizat cu oxid de etilenă <b>NL</b> - Gesteriliseerd met ethyleenoxide <b>HR</b> - Sterilizirano etilen oksidom <b>HU</b> - Etilén-oxiddal sterilizálva <b>DK</b> - Steriliseret med ethylenoxid <b>BG</b> - Steriliseret med ethylenoxid <b>LT</b> - Sterilizuotas etileno oksidu <b>LV</b> - Sterilizēts ar etilēnoksīdu <b>EE</b> - Steriliseeritud etüleenoksiidiga <b>AR</b> - معقم باكسيد الإيثيلين</p>

	<p><b>IT</b> - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea <b>GB</b> - Authorized representative in the European community <b>FR</b> - Représentant autorisé dans la Communauté européenne <b>ES</b> - Representante autorizado en la Comunidad Europea <b>PT</b> - Representante autorizado na União Europeia <b>DE</b> - Autorisierter Vertreter in der EG <b>GR</b> - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση <b>PL</b> - Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej <b>CZ</b> - Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství <b>SE</b> - Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen <b>FI</b> - Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä <b>SI</b> - Pooblaščen zastopnik za Evropsko skupnost <b>SK</b> - Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve <b>RO</b> - Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene <b>NL</b> - Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap <b>HR</b> - Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici <b>HU</b> - Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségekben <b>DK</b> - Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab <b>BG</b> - Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab <b>LT</b> - Įgaliotasis atstovas Europos bendrijoje <b>LV</b> - Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā <b>EE</b> - Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses <b>AR</b> - ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي</p>
	<p><b>IT</b> - Dispositivo medico <b>GB</b> - Medical Device <b>FR</b> - Dispositif médical <b>ES</b> - Producto sanitario <b>PT</b> - Dispositivo médico <b>DE</b> - Medizinprodukt <b>GR</b> - Ιατροτεχνολογικό προϊόν <b>PL</b> - Wyrób medyczny <b>CZ</b> - Zdravotnický prostředek <b>SE</b> - Medicinteknisk produkt <b>FI</b> - Lääkinnällinen laite <b>SI</b> - Medicinski pripomoček <b>SK</b> - Zdravotnícka pomôcka <b>RO</b> - Dispozitiv medical <b>NL</b> - Medisch hulpmiddel <b>HR</b> - Medicinski uređaj <b>HU</b> - Orvostechnikai eszköz <b>DK</b> - Medicinsk udstyr <b>BG</b> - Medicinsk udstyr <b>LT</b> - Medicininis prietais <b>LV</b> - Medicīniskā ierīce <b>EE</b> - Meditsiiniline seade <b>AR</b> - جهاز طبي</p>
	<p><b>IT</b> - Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> - Consult instructions for use <b>FR</b> - Consulter les instructions d'utilisation <b>ES</b> - Consultar las instrucciones de uso <b>PT</b> - Consulte as instruções de uso <b>DE</b> - Gebrauchsanweisung beachten <b>GR</b> - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης <b>PL</b> - Prze czytaj instrukcję użytkowania <b>CZ</b> - Přečtěte si návod k použití <b>SE</b> - Läs bruksanvisningen <b>FI</b> - Lue käyttöohjeet <b>SI</b> - Preberite navodila za uporabo <b>SK</b> - Prečítajte si návod na použitie <b>RO</b> - Citiți instrucțiunile de utilizare <b>NL</b> - Lees de gebruiksaanwijzing <b>HR</b> - Pročitajte upute za uporabu <b>HU</b> - Olvassa el a használati utasításokat <b>DK</b> - Se brugsvejledningen <b>BG</b> - Se brugsvejledningen <b>LT</b> - Perskaitykite naudojimo instrukcijas <b>LV</b> - Izlasiet lietošanas instrukcijas <b>EE</b> - Lugege kasutusjuhendit <b>AR</b> - اقرأ بندقه وحرص تعليمات الاستخدام</p>

	<p><b>IT</b> - Dispositivo monouso, non riutilizzare  <b>GB</b> - Disposable device, do not re-use  <b>FR</b> - Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser  <b>ES</b> - Dispositivo monouso, no reutilizable  <b>PT</b> - Dispositivo descartável, não reutilizar  <b>DE</b> - Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden  <b>GR</b> - Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου  <b>PL</b> - Jedno użyczenie, nie używaj ponownie  <b>CZ</b> - Jednorázový prostředek, nepoužívejte opakovaně  <b>SE</b> - Engångsanordning, får ej återanvändas  <b>FI</b> - Kertakäyttöinen laite, ei saa käyttää uudelleen  <b>SI</b> - Za enkratno uporabo, ne uporabiti ponovno  <b>SK</b> - Zariadenie na jedno použitie, nepoužívajte opakovane  <b>RO</b> - Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi  <b>NL</b> - Voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken  <b>HR</b> - Uređaj za jednokratnu upotrebu, nemojte ponovo koristiti  <b>HU</b> - Eldobható eszköz, ne használja újra  <b>DK</b> - Engangsenhed, må ikke genbruges  <b>BG</b> - Engangsenhed, må ikke genbruges  <b>LT</b> - Vienkartinis prietaisas, nenaudokite pakartotinai  <b>LV</b> - Vienreiz lietojama ierice, nelietojiet to atkārtoti  <b>EE</b> - Ühekordne, ärge kasutage seda mitu korda  <b>AR</b> - أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد</p>
<b>LOT</b>	<p><b>IT</b> - Numero di lotto  <b>GB</b> - Lot number  <b>FR</b> - Numéro de lot  <b>ES</b> - Número de lote  <b>PT</b> - Número de lote  <b>DE</b> - Chargennummer  <b>GR</b> - Αριθμός παρτίδας  <b>PL</b> - Kod partii  <b>CZ</b> - Číslo šarže  <b>SE</b> - Satsnummer  <b>FI</b> - Erännumero  <b>SI</b> - Številka partije  <b>SK</b> - Číslo šarže  <b>RO</b> - Număr de lot  <b>NL</b> - Partijnummer  <b>HR</b> - Broj serije  <b>HU</b> - Tételszám  <b>DK</b> - Batchnummer  <b>BG</b> - Batchnummer  <b>LT</b> - Partijos numeris  <b>LV</b> - Partijas numurs  <b>EE</b> - Partii number  <b>AR</b> - رقم الدفعة</p>
<b>CH</b> <b>REP</b>	<p><b>IT</b> - Rappresentante autorizzato in Svizzera  <b>GB</b> - Authorized Representative in Swiss  <b>FR</b> - Représentant autorisé en Suisse  <b>ES</b> - Representante autorizado en Suiza  <b>PT</b> - Representante autorizado no Suíço  <b>DE</b> - Autorisierter Vertreter im Schweizer  <b>GR</b> - Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο Ελβετός  <b>PL</b> - Autoryzowany Przedstawiciel w Szwajcarski  <b>CZ</b> - Autorizovaný zástupce ve švýcarsku  <b>SE</b> - Auktoriserad representant i Schweiziska  <b>FI</b> - Valtuutettu edustaja Sveitsiläinen  <b>SI</b> - Pooblaščen zastopnik v Švicaru  <b>SK</b> - Autorizovaný zástupca v švajčiarsky  <b>RO</b> - Reprezentant autorizat în Elvețiane  <b>NL</b> - Geautoriseerde  <b>HR</b> - Ovlašten predstavnik u Zvitsers  <b>HU</b> - Meghatalmazott képviselő az Svájci  <b>DK</b> - Autoriseret repræsentant i Schweizisk  <b>NO</b> - Autorisert representant i Sveitsiska  <b>BG</b> - Оторизиран представник в швейцарски  <b>LT</b> - Įgaliojtas atstovas Šveicarijoje  <b>LV</b> - Pilnvarotais pārstāvis Šveices  <b>EE</b> - Pilnvarotais pārstāvis Šveice  <b>SA</b> - الممثل المعتمد في المملكة المتحدة</p>

	<p><b>IT</b> - Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745  <b>GB</b> - Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745  <b>FR</b> - Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745  <b>ES</b> - Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745  <b>PT</b> - Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745  <b>DE</b> - Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745  <b>GR</b> - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745  <b>PL</b> - Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745  <b>CZ</b> - Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) č. 2017/745  <b>SE</b> - Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745  <b>FI</b> - Lääkinnällinen laite, joka vastaa asetusta (EU) 2017/745  <b>SI</b> - Medicinski pripomoček, skladen z uredbo (EU) 2017/745  <b>SK</b> - Zdravotnícka pomôcka v súlade s nariadením (EU) 2017/745  <b>RO</b> - Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745  <b>NL</b> - Medisch hulpmiddel in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745  <b>HR</b> - Medicinski proizvod sukladan propisu (EU) 2017/745  <b>HU</b> - A 2017/745/EU rendeletnek megfelelő orvosteknikai eszköz  <b>DK</b> - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745  <b>BG</b> - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745  <b>LT</b> - Medicinos prietaisas, atitinkantis reglamentą (ES) 2017/745  <b>LV</b> - Mediciniska ierīce, kas atbilst Regulai (ES) 2017/745  <b>EE</b> - Määrusele (EL) 2017/745 vastav meditsiinisead  <b>AR</b> - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745</p>
	<p><b>IT</b> - Data di scadenza  <b>GB</b> - Expiration date  <b>FR</b> - Date d'échéance  <b>ES</b> - Fecha de caducidad  <b>PT</b> - Data de validade  <b>DE</b> - Ablaufdatum  <b>GR</b> - Ημερομηνία λήξεως  <b>PL</b> - Data ważności  <b>CZ</b> - Datum ukončení platnosti  <b>SE</b> - Utgångsdatum  <b>FI</b> - Viimeinen voimassaolopäivä  <b>SI</b> - Rok uporabnosti  <b>SK</b> - Dátum expirácie  <b>RO</b> - Valabil până la data de  <b>NL</b> - Vervaldatum  <b>HR</b> - Datum isteka  <b>HU</b> - Lejárati dátum  <b>DK</b> - Udløbsdato  <b>BG</b> - Udløbsdato  <b>LT</b> - Galiojimo laikas  <b>LV</b> - Derīguma termiņš  <b>EE</b> - Aegumiskuupäev  <b>AR</b> - تاريخ انتهاء الصلاحية</p>
<b>REF</b>	<p><b>IT</b> - Codice prodotto  <b>GB</b> - Product code  <b>FR</b> - Code produit  <b>ES</b> - Código producto  <b>PT</b> - Código produto  <b>DE</b> - Erzeugniscode  <b>GR</b> - Κωδικός προϊόντος  <b>PL</b> - Numer katalogowy  <b>CZ</b> - Kód výrobku  <b>SE</b> - Produktkod  <b>FI</b> - Tuotekoodi  <b>SI</b> - Koda izdelka  <b>SK</b> - Kód výrobku  <b>RO</b> - Cod produs  <b>NL</b> - Productcode  <b>HR</b> - Šifra proizvoda  <b>HU</b> - Termékkód  <b>DK</b> - Produktkode  <b>BG</b> - Produktkode  <b>LT</b> - Prekės kodas  <b>LV</b> - Produkta kods  <b>EE</b> - Toote kood  <b>AR</b> - كود المنتج</p>

	<p> <b>IT</b> - Singolo sistema di barriera sterile con imballo protettivo esterno <b>GB</b> - Single sterile barrier system in protective outer packaging <b>FR</b> - Système de barrière stérile unique dans un emballage extérieur protecteur <b>ES</b> - Sistema de barrera estéril simple en embalaje exterior protector <b>PT</b> - Sistema de barreira estéril única em embalagem externa protetora <b>DE</b> - Einzelnes Sterilbarrieresystem in schützender Umverpackung <b>GR</b> - Μόνο αποστειρωμένο σύστημα φραγής σε προστατευτική εξωτερική συσκευασία <b>PL</b> - Pojedynczy sterylony system barierowy w ochronnym opakowaniu zewnętrznym <b>CZ</b> - Jediný sterilní bariérový systém v ochranném vnějším obalu <b>SE</b> - Enkelt sterilt barriärsystem i skyddande ytterförpackning <b>FI</b> - Yksi steriili sulkujärjestelmä suojaavassa ulkopakkauksessa <b>SI</b> - Enojni sterilni pregradni sistem v zaščitni zunanji embalaži <b>SK</b> - Jednoduchý sterilný bariérový systém v ochrannom vonkajšom obale <b>RO</b> - Sistem de barieră steril unic în ambalaj exterior de protecție <b>NL</b> - Enkelvoudig steriel barrièresysteem in beschermende buitenverpakking <b>HR</b> - Jednostruki sustav sterilne barijere u zaštitnom vanjskom pakiranju <b>HU</b> - Egyetlen steril gátrendszer védő külső csomagolásban <b>DK</b> - Enkelt sterilt barrieresystem i beskyttende ydre emballage <b>BG</b> - Единична стерилна бариерна система в защитна външна опаковка <b>LT</b> - Viena sterili barjerinė sistema apsauginėje išorinėje pakuotėje <b>LV</b> - Viena sterila barjeras sistēma aizsargājošā ārējā iepakojumā <b>EE</b> - Ühekordne steriilne tõkkesüsteem kaitsvas välispakendis <b>AR</b> - نظام حاجز معقم فردي مع عبوة واقية خارجية                 </p>
	<p> <b>IT</b> - Identificatore unico dispositivo <b>GB</b> - Unique device identifier <b>FR</b> - Identifiant unique de l'appareil <b>DE</b> - Eindeutige Geräteerkennung <b>ES</b> - Identificador de dispositivo único <b>PT</b> - Identificador exclusivo do dispositivo <b>GR</b> - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής <b>BG</b> - Уникален идентификатор на устройството <b>CZ</b> - Jediněčný identifikátor zařízení <b>DA</b> - Unik enhedsidentifikator <b>EE</b> - Seadme kordumatu identifikaator <b>FI</b> - Ainutlaatuinen laitetunniste <b>HR</b> - Jedinstveni identifikator uređaja <b>HU</b> - Egyedi eszközazonosító <b>LT</b> - Unikalus įrenginio identifikatorius <b>LV</b> - Unikāls ierices identifikators <b>NO</b> - Unik enhedsidentifikator <b>NL</b> - Unieke apparaat-ID <b>PL</b> - Unikalny identyfikator urządzenia <b>RO</b> - Identificator unic de dispozitiv <b>SK</b> - Jediněčný identifikátor zariadenia <b>SL</b> - Enolični identifikator naprave <b>SV</b> - Unik enhetsidentifierare <b>SA</b> - معرف الجهاز الفريد                 </p>