



Break the inside water bubble, by squeezing the bag with both hands.
Premere con entrambe le mani verso il centro fino ad ottenere la rottura della bolla interna.
Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains.
Presionar con las dos manos hacia el centro hasta obtener la rotura de la burbuja interna.



Then shake it in order to mix the contents.
Agitare il sacchetto per miscelare il contenuto.
Éroulter agiter le sachet pour mélanger le contenu.
Agitar la bolsa para mezclar el contenido.



Apply on the interested part.
Applicare sulla parte interessata.
Appliquer sur la partie intéressée.
Aplicar sobre la parte interesada.



Instant cold compress Ghiaccio istantaneo in busta PE

- Pochette de froid instantané
- Hielo instantáneo (frío)
- Sofort-Kälte-Kompresse (Kalt)
- Gêlo instantâneo (frio)
- Στιγμιαίος πάγος (κρύος)
- تلج فوري (بارد)

REF **34111** 14x18 cm - PE bag

 **Fabbricante/Manufacturer:**
Gima S.p.A - Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in Italy




GIMA
www.gimaitaly.com

MODE D'EMPLOI: casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains. Ensuite agiter le sachet pour mélanger le contenu. Appliquer sur la partie intéressée. **INDICATIONS:** hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie, et en tous les cas où la cryothérapie est nécessaire. **ATTENTION:** produit uniservice destiné exclusivement à usage externe. Ne pas casser la confection ou ne pas provoquer la sortie du contenu. Tenir le sachet hors de portée des enfants. Le contenu tache et est nuisible si ingéré. Si cela arrivait accidentellement consulter immédiatement un médecin. Stocker à température ambiante. Tenir loin des sources de chaleur et des substances inflammables. Ne pas appliquer sur la peau endommagée. Avant d'utiliser le sachet sur les bébés, les enfants ou les personnes âgées ou en cas de diabète ou maladie cardiovasculaire et/ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud) il est impératif de consulter le médecin. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. En cas de doute sur le traitement à utiliser, consulter votre médecin ou votre pharmacien.
CONTENU: mixture des sels azotés (conforme au règlement CE 1907/2006 m.s.l.) et eau.

509146 - Rev. 2 - 04/16 Size 14x18 cm