



Break the inside water bubble, by squeezing the bag with both hands.  
 Premere con entrambe le mani verso il centro fino ad ottenere la rottura della bolla interna.  
 Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains.  
 Presionar con las dos manos hacia el centro hasta obtener la rotura de la burbuja interna.



Then shake it in order to mix the contents.  
 Agitare il sacchetto per miscelare il contenuto.  
 Ensuite agiter le sachet pour mélanger le contenu.  
 Agitar la bolsa para mezclar el contenido.



Apply on the interested part.  
 Applicare sulla parte interessata.  
 Appliquer sur la partie intéressée.  
 Aplicar sobre la parte interesada.



## Instant cold compress Ghiaccio istantaneo in busta PE

- Pochette de froid instantané
- Hielo instantáneo (frío)
- Sofort-Kälte-Kompresse (Kalt)
- Gêlo instantâneo (frio)
- Στιγμιαίος πάγος (κρύος)
- تلج فوري (بارد)

REF 34111 14x18 cm - PE bag

Fabbricante/Manufacturer:  
 Gima S.p.A - Via Marconi, 1  
 20060 Gessate (MI) - Italy  
 Made in Italy



CE 0476



**GIMA**  
 www.gimaitaly.com

**ISTRUCCIONES:** presionar con las dos manos hacia el centro hasta obtener la rotura de la burbuja interna. Agitar la bolsa para mezclar el contenido. Aplicar sobre la parte interesada.

**INDICACIONES DE USO:** hematomas, esguinces, traumatismos, hipertemias y en todos los casos en que se necesite la crioterapia y el uso del frío.  
**ATENCIÓN:** es un producto exclusivamente para uso externo, desechable. No romper la bolsa y no provocar la salida del contenido. El contenido mancha y es nocivo si se ingiere. Si ocurriera esto, pedir inmediatamente la atención de un médico.

Conservar a temperatura ambiente lejos del alcance de los niños, lejos de fuentes de calor y de materiales inflamables. No aplicar sobre la piel dañada. En caso de enfermedades cardiovasculares, circulatorias, de diabetes e/o insensibilidad cutánea (enfermedad de Raynaud) utilizar el producto sólo después de consultar al médico. Cuando se utiliza en bebés, niños y ancianos, consultar al médico antes del tratamiento. En caso de duda sobre el tratamiento a efectuar y si los síntomas persisten, consultar al médico. **CONTENIDO:** mezcla de sales nitrogenadas (conforme a los requisitos del Reg. CE 1907/2006 y sus modificaciones e integraciones) y agua.

509146 - Rev. 2 - 04/16 Size 14x18 cm