



Connettore a T Adulti,
per Aeroneb® Solo
(confezione da 10)

CODICE PRODOTTO:
AEAG-AS3010

PRODUTTORE:
AEROGEN Inc. Ltd , Irlanda



DESCRIZIONE ANALITICA

Il Connettore a T Adulti per Aeroneb® Solo consente l'inserimento dell'unità di nebulizzazione Aeroneb® Solo nel circuito paziente del ventilatore.

DESTINAZIONE D'USO

Il Connettore a T viene utilizzato insieme all'Unità di nebulizzazione Aeroneb® Solo e il Modulo di controllo Aeroneb® Pro-X.

Il connettore a T è stato progettato per essere compatibile con Circuiti respiratori standard per pazienti adulti, sia in ventilazione meccanica che in supporto respiratorio non invasivo. Può essere utilizzato per la somministrazione continua o intermittente di farmaci.

Durante il funzionamento non richiede nessuna modifica dei parametri di ventilazione e consente il rabbocco dei farmaci senza interruzione del supporto respiratorio.



CODICE PRODOTTO:
AEAG-AS3010

DATI TECNICI:

CARATTERISTICHE:

Il connettore a T è completamente realizzato in materiale plastico trasparente, apirogeno ed è privo di lattice.

I raccordi dell'adattatore a T sono maschio e femmina standard da 22 mm di diametro compatibili con i circuiti paziente standard per ventilatore.

La lunghezza del connettore a T Adulti è di 7,7 cm.

Il Connettore a T non è sterile (materiale igienizzato).

DURATA:

Come tutti i componenti del circuito paziente in supporto respiratorio ha una durata definita. Il connettore a T può essere utilizzato per un massimo di 28 giorni (profilo tipico di 4 cicli/giorno). Non è autorizzato l'uso del dispositivo oltre il periodo massimo previsto.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO:

Temperatura:	5° - 45°C
Umidità Relativa:	0 - 95% UR (senza condensa)
Pressione Atmosferica:	450 - 1100 hPa
Pressione di Circuito Paziente:	90 cmH ₂ O

CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO:

Temperatura:	-20° - 60°C
Umidità Relativa:	0 - 95% UR (senza condensa)
Pressione Atmosferica:	450 - 1100 hPa



CODICE PRODOTTO:
AEAG-AS3010

NORME PRECAUZIONALI:

Non usare su più di un paziente e oltre il termine stabilito. Non lasciare soli i pazienti durante il funzionamento del nebulizzatore. Se l'unità di nebulizzazione Aeroneb® Solo non è inserita, occludere l'apertura del connettore a T con apposito tappo di chiusura.

Prima dell'uso, montare il nebulizzatore ed eseguire un test di funzionalità seguendo le istruzioni contenute nel manuale operativo.

CONTROINDICAZIONI:

Non utilizzare un filtro o uno scambiatore di calore-umidità (HME) tra il nebulizzatore e le vie respiratorie del paziente. Per evitare che il farmaco espirato influisca sul funzionamento del respiratore, attenersi alle istruzioni rilasciate dal produttore del respiratore relative all'uso di un filtro batterico nella linea espiratoria del circuito paziente.

Per garantire la corretta somministrazione del farmaco, consultare le istruzioni del produttore del farmaco relative all'idoneità alla nebulizzazione. Non nebulizzare farmaci a base alcolica che possono incendiarsi a contatto con aria arricchita di ossigeno in condizioni di alta pressione.

Per evitare il rischio di incendio, non usare in presenza di sostanze infiammabili.

www.elettromedicali.it



CODICE PRODOTTO:
AEAG-AS3010

NORMATIVE:

Standard di riferimento soddisfatti a norma di legge riportati sul manuale operativo dell'Aeroneb® Solo.

CONFEZIONI:

Il Connettore a T per Adulti è disponibile in confezioni da 10 pezzi, confezionati singolarmente in una busta in PVC sigillata con apertura a strappo.