



ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA






Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
Italia: tel 199 400 401 - fax 199 400 403 - gima@gimaitaly.com
Export: phone + 39 02 953854209/221/225 - fax + 39 02 95380056
- export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

COD. 27337 MANUALE UTENTE ORCHIDOMETRO

INTRODUZIONE:

L'orchidometro è un dispositivo utilizzato per misurare il volume dei testicoli. È composto da un filo di dodici sfere numerate in legno. Le sfere sono ordinate in ordine crescente da 1 a 25 millimetri. La discrepanza della dimensione dei testicoli con gli altri parametri di maturità sessuale può essere un'importante indicazione sulla presenza di varie patologie.

SIMBOLI:

Simbolo	Definizione del simbolo
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42 (articolo 17)
	Numero di lotto
	Indirizzo fabbricante
	Codice prodotto

SI RACCOMANDA DI LEGGERE LE SEGUENTI INDICAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'ORCHIDOMETRO:

Avvertenze

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere lontano da fonti di calore.

Attenzione



1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Il prodotto deve essere smaltito in base alle leggi nazionali. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle sanzioni.
3. Si prega di maneggiare il dispositivo con cura per evitare danni da uso improprio.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Utilizzare un panno pulito o un fazzoletto di carta leggermente imbevuto di disinfettante per pulire la superficie dell'orchidometro.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ORCHIDOMETRO

Comparare le sfere dell'orchidometro all'area dei testicoli per rilevare lo stadio di maturità sessuale. Leggere il numero sulla sfera che si avvicina maggiormente alla dimensione del testicolo.

Numero presente sulla sfera	Stadio di maturità sessuale
1~3	Infanzia
4, 6	Prima pubertà
8, 10	Pubertà
14, 16	Pubertà avanzata
18, 25	Età adulta

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.



GIMA S.p.A. Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) – Italy