

<b>GB</b>	<b>OPERATING INSTRUCTIONS</b>
<b>FR</b>	<b>MODE D'EMPLOI</b>
<b>NL</b>	<b>BEDIENINGSHANDLEIDING</b>
<b>ES</b>	<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>
<b>IT</b>	<b>ISTRUZIONI PER L'USO</b>
<b>FIN</b>	<b>KÄYTTÖOHJE</b>
<b>SE</b>	<b>BRUKSANVISNING</b>
<b>NO</b>	<b>BRUKSANVISNING</b>
<b>GR</b>	<b>Οδηγίες χρήσης</b>
<b>TR</b>	<b>KULLANIM KILAVUZU</b>
<b>SK</b>	<b>NÁVOD NA OBSLUHU</b>
<b>CZ</b>	<b>NÁVOD K OBSLUZE</b>
<b>PL</b>	<b>Instrukcja obsługi</b>
<b>RU</b>	<b>Руководство по эксплуатации</b>

# STATIVWAAGE 7830/7831

<b>DE</b> DEUTSCH	STATIVWAAGE 7830/7831

**Getreiteausfütungen**  
7830.0.001 ohne Längenausleger  
7830.0.001 mit Längenausleger

Die Daten zur Spannungsversorgung sind auf dem Steckernetzteil angegeben.  
Arbeitsbereich: -5 - 35°C  
Lagerbereich: -20 - 65°C  
Maßebericht: 220 kg  
Zeilenschnitt: 100 g

**Hitze**  
Unter extremen elektrostatischen sowie elektromagnetischen Einflüssen z.B. beim Betreiben eines Funkgerätes oder Handys in unmittelbarer Nähe des Gerätes kann eine Beeinträchtigung des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störereignisses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß zu benutzen, ggf. ist ein Wiederanschießen erforderlich.  
Die Messwertanzeigen (Wahlwörter, Schranke, Temperaturanzeigen) können durch einen Stromausfall, Wahlwörter, Schranke, Temperaturanzeigen und Korrosionsanfrischung, zur Beeinträchtigung des Waageergebnisses führen. Das Kabel des Steckernetztes an der Rückseite der Plattform einstecken und Korrosionsanfrischung, Wahlwörter, Schranke, Temperaturanzeigen, Ticker, Dampfer, Flüssigkeiten und starke Verschmutzung zu vermeiden. Die Messwertanzeigen Komponenten werden dadurch beschädigt und Sie verlieren Ihren Gewährleistungsanspruch.  
Dieses Gerät ist funktionsfest entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 2004/108/EC.

**Wartung und Service**  
Die Waage bedarf keiner routinemäßigen Wartung. Es ist jedoch sinnvoll die Genauigkeit in periodischen Abständen zu kontrollieren. Die Hängung, bei feststehender Abwägung, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den Soehhle Professional-Kundendienst.  
den Eigentum von Soehhle Professional.  
Schädigt die Mängelbescheinigung oder Ersatzlieferung (Hilf, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie die Rechnung als Nachweis auf. Im Servicefall kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den Soehhle Professional-Kundendienst.

**Gewährleistung/Haftung**  
Soweit ein von Soehhle Professional zu verwendender Mangel der geliefertem Sachverleiage, ist Soehhle Professional berechtigt, wahlweise den Mangel zu beheben oder Ersatz zu liefern. Ersatzteile werden dem Eigentümer von Soehhle Professional.  
Drücken Sie die Funktionstaste.  
> Anzeige z.B. »47,6 kg«  
> Anzeige z.B. »47,6 kg«  
> Drücken Sie die Funktionstaste.  
> Anzeige z.B. »47,6 kg«  
> Anzeige z.B. »47,6 kg«  
> und Sieht zusammen mit dem Kind noch mal auf die Waage stellen.  
> Sie erhalten das Gewicht des Kindes z.B. »5,1 kg«

**Entsorgung**  
Die Stativwaage enthält nach dem derzeitigen Wissensstand keine umweltgefährlichen Stoffe.  
Die Waage ist wiederverwertbar.  
**Sortieren**  
Mit der Funktionstaste an der Rückseite der Anzeige kann die Waage für den nächsten Tag sortieren. In der Anzeige erscheint »0,0 kg« und die Waage ist eingeschoben.

**Mitter-/Kind-Funktion**  
Längenausleger vorsichtig hochklappen und nach oben schieben. Dann das Kopfteil auf den Kopf des Patienten legen. Bei feststehender Abwägung kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den Soehhle Professional-Kundendienst.  
> Drücken Sie die Funktionstaste.  
> Anzeige z.B. »47,6 kg«  
> Anzeige z.B. »47,6 kg«  
> und Sieht zusammen mit dem Kind noch mal auf die Waage stellen.  
> Sie erhalten das Gewicht des Kindes z.B. »5,1 kg«

<b>DE</b> DEUTSCH	STATIVWAAGE 7830/7831

<b>FR</b> FRANCAIS	CE
<b>PÈSE-PERSONNES À COLONNE 7830/7831</b>	
<b>FR</b> FRANCAIS	CE
<b>PÈSE-PERSONNES À COLONNE 7830/7831</b>	
<b>FR</b> FRANCAIS	CE
<b>PÈSE-PERSONNES À COLONNE 7830/7831</b>	
<b>FR</b> FRANCAIS	CE
<b>PÈSE-PERSONNES À COLONNE 7830/7831</b>	

Wenn beide die Waage wieder verlassen zeigt die Anzeige im Beispiel »0,0 kg«. Mit der Funktionstaste können Sie die Waage wieder auf »0,0 kg« stellen.  
Lüftungsgitter, unsichtbare Lagerung oder Verwindung, fehlerhafte Montage bzw. unbedeutende Lagerung der Batterie oder durch Dritte, natürliche Abnutzung, Veränderung durch den Benutzer oder durch Dritte, Montage bzw. unbedeutende Lagerung der Batterie oder durch Dritte, Besätze Behandlung, insbesondere übermäßige Beanspruchung, chemische, elektrochemische, elektrische Einflüsse oder Feuchtigkeit, soem diese nicht auf ein Verschulden von Soehhle Professional zurückzuführen sind.

**Ausschalten**  
Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn die Anzeige ca. 15 Sekunden auf »0,0 kg« steht.  
**Einheitenumschaltung**  
Standardmäßig ist die Einheit kg eingestellt.  
Ständemäßig ist die Einheit kg eingestellt.  
Wenn Sie die Waage in eine andere Einheit umschalten möchten, gehen Sie wie folgt vor:  
• Funktionstaste drücken, gedrückt halten und gleichzeitig den Netzstecker ziehen.  
• Anzeige wechselt auf lb.

Um die Anzeige wieder auf kg umzustellen wiederholen Sie bitte den oben beschriebenen Vorgang.  
**Fehlermeldungen**  
Nullstellen - kein Stillstand - Ruhig stehen  
Tafelonen - negativer Gewichtswert  
Unterlast - Gewicht ist über dem Maximumgewicht  
Überlast - Gewicht von der Plattform nehmen  
Unterlast - Service kontaktieren

<b>Er5</b>	Nullstellen	- kein Stillstand - Ruhig stehen
<b>Er6</b>	Tafelonen	- negativer Gewichtswert
<b>Er7</b>	Überlast	- Gewicht von der Plattform nehmen
<b>Er8</b>	Unterlast	- Service kontaktieren
<b>Er9</b>	Überlast	- Gewicht von der Plattform nehmen
<b>Er10</b>	Überlast	- Gewicht von der Plattform nehmen
<b>Er11</b>	Längenausleger nicht in Referenzposition	- Waage einschalten > Neustart > Service kontaktieren
<b>Er12</b>	Längenausleger nicht in Referenzposition	- Längenausleger beim Einschalten ganz einhängen
<b>Er13</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er14</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er15</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er16</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er17</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er18</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er19</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er20</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er21</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er22</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er23</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er24</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er25</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er26</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er27</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er28</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er29</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er30</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er31</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er32</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er33</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er34</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er35</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er36</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er37</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er38</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er39</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er40</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er41</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er42</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er43</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er44</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er45</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er46</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er47</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er48</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er49</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er50</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er51</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er52</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er53</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er54</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er55</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er56</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er57</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er58</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er59</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er60</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er61</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er62</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er63</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er64</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er65</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er66</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er67</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er68</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er69</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er70</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er71</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er72</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er73</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er74</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er75</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er76</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er77</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er78</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er79</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er80</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er81</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er82</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er83</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er84</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er85</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er86</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er87</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er88</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er89</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er90</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er91</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er92</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er93</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er94</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er95</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er96</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er97</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er98</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er99</b>	Überlast	- Service kontaktieren
<b>Er100</b>	Überlast	- Service kontaktieren



**Designs**  
7830.0.001 without measuring rod  
7830.0.001 with measuring rod

<b>DE</b> DEUTSCH	STATIVWAAGE 7830/7831

**Disposal**  
According to current knowledge, the upright scale does not contain any environmentally harmful substances.

**Cleaning**  
The device may be cleaned with a damp cloth and common cleaning products. Do not use any abrasive cleaning products.

**Maintenance and Service**  
The scale does not require regular maintenance. Yet, it is useful to check measurement accuracy at regular intervals. The frequency of such checks depends on the use and condition of the scale.

**Instruction**  
Measurement values may be affected by extreme electrostatic and electromagnetic interference, e.g. during the operation of a transmitter or a cell phone near the device. Once the interference subsides, the product may revert to normal operation. Possibly, it may be necessary to turn the scale off and on again.

**Technical Specifications**  
The technical specifications of the power supply are printed on the power adapter.

**Designs**  
7830.0.001 without measuring rod  
7830.0.001 with measuring rod

**Disposal**  
According to current knowledge, the upright scale does not contain any environmentally harmful substances.

**Cleaning**  
The device may be cleaned with a damp cloth and common cleaning products. Do not use any abrasive cleaning products.

**Maintenance and Service**  
The scale does not require regular maintenance. Yet, it is useful to check measurement accuracy at regular intervals. The frequency of such checks depends on the use and condition of the scale.

**Instruction**  
Measurement values may be affected by extreme electrostatic and electromagnetic interference, e.g. during the operation of a transmitter or a cell phone near the device. Once the interference subsides, the product may revert to normal operation. Possibly, it may be necessary to turn the scale off and on again.

**Technical Specifications**  
The technical specifications of the power supply are printed on the power adapter.

**Designs**  
7830.0.001 without measuring rod  
7830.0.001 with measuring rod

<b>DE</b> DEUTSCH	STATIVWAAGE 7830/7831

**Disposal**  
According to current knowledge, the upright scale does not contain any environmentally harmful substances.

**Cleaning**  
The device may be cleaned with a damp cloth and common cleaning products. Do not use any abrasive cleaning products.

**Maintenance and Service**  
The scale does not require regular maintenance. Yet, it is useful to check measurement accuracy at regular intervals. The frequency of such checks depends on the use and condition of the scale.

**Instruction**  
Measurement values may be affected by extreme electrostatic and electromagnetic interference, e.g. during the operation of a transmitter or a cell phone near the device. Once the interference subsides, the product may revert to normal operation. Possibly, it may be necessary to turn the scale off and on again.

**Technical Specifications**  
The technical specifications of the power supply are printed on the power adapter.

**Designs**  
7830.0.001 without measuring rod  
7830.0.001 with measuring rod

**Disposal**  
According to current knowledge, the upright scale does not contain any environmentally harmful substances.

**Cleaning**  
The device may be cleaned with a damp cloth and common cleaning products. Do not use any abrasive cleaning products.

**Maintenance and Service**  
The scale does not require regular maintenance. Yet, it is useful to check measurement accuracy at regular intervals. The frequency of such checks depends on the use and condition of the scale.

**Instruction**  
Measurement values may be affected by extreme electrostatic and electromagnetic interference, e.g. during the operation of a transmitter or a cell phone near the device. Once the interference subsides, the product may revert to normal operation. Possibly, it may be necessary to turn the scale off and on again.

**Technical Specifications**  
The technical specifications of the power supply are printed on the power adapter.

**Designs**  
7830.0.001 without measuring rod  
7830.0.001 with measuring rod

<b>DE</b> DEUTSCH	STATIVWAAGE 7830/7831

**Disposal**  
According to current knowledge, the upright scale does not contain any environmentally harmful substances.

**Cleaning**  
The device may be cleaned with a damp cloth and common cleaning products. Do not use any abrasive cleaning products.

**Maintenance and Service**  
The scale does not require regular maintenance. Yet, it is useful to check measurement accuracy at regular intervals. The frequency of such checks depends on the use and condition of the scale.

**Instruction**  
Measurement values may be affected by extreme electrostatic and electromagnetic interference, e.g. during the operation of a transmitter or a cell phone near the device. Once the interference subsides, the product may revert to normal operation. Possibly, it may be necessary to turn the scale off and on again.

**Technical Specifications**  
The technical specifications of the power supply are printed on the power adapter.

**Designs**  
7830.0.001 without measuring rod  
7830.0.001 with measuring rod

**Disposal**  
According to current knowledge, the upright scale does not contain any environmentally harmful substances.

**Cleaning**  
The device may be cleaned with a damp cloth and common cleaning products. Do not use any abrasive cleaning products.

**Maintenance and Service**  
The scale does not require regular maintenance. Yet, it is useful to check measurement accuracy at regular intervals. The frequency of such checks depends on the use and condition of the scale.

**Instruction**  
Measurement values may be affected by extreme electrostatic and electromagnetic interference, e.g. during the operation of a transmitter or a cell phone near the device. Once the interference subsides, the product may revert to normal operation. Possibly, it may be necessary to turn the scale off and on again.

**Technical Specifications**  
The technical specifications of the power supply are printed on the power adapter.



**Disposal**  
According to current knowledge, the upright scale does not contain any environmentally harmful substances.

**Cleaning**  
The device may be cleaned with a damp cloth and common cleaning products. Do not use any abrasive cleaning products.

**Maintenance and Service**  
The scale does not require regular maintenance. Yet, it is useful to check measurement accuracy at regular intervals. The frequency of such checks depends on the use and condition of the scale.

**Instruction**  
Measurement values may be affected by extreme electrostatic and electromagnetic interference, e.g. during the operation of a transmitter or a cell phone near the device. Once the interference subsides, the product may revert to normal operation. Possibly, it may be necessary to turn the scale off and on again.

**Technical Specifications**  
The technical specifications of the power supply are printed on the power adapter.

**Designs**  
7830.0.001 without measuring rod  
7830.0.001 with measuring rod

**Disposal**  
According to current knowledge, the upright scale does not contain any environmentally harmful substances.

**Cleaning**  
The device may be cleaned with a damp cloth and common cleaning products. Do not use any abrasive cleaning products.

**Maintenance and Service**  
The scale does not require regular maintenance. Yet, it is useful to check measurement accuracy at regular intervals. The frequency of such checks depends on the use and condition of the scale.

**Instruction**  
Measurement values may be affected by extreme electrostatic and electromagnetic interference, e.g. during the operation of a transmitter or a cell phone near the device. Once the interference subsides, the product may revert to normal operation. Possibly, it may be necessary to turn the scale off and on again.

**Technical Specifications**  
The technical specifications of the power supply are printed on the power adapter.

**Soehhle Professional GmbH & Co. KG**  
Manfred-von-Ardenne-Allee 12  
DE-71522 Backnang

Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-0  
Telefax +49 (0) 71 91 / 34 53-211  
info@soehhle-professional.com  
www.soehhle-professional.com

WAAGEN, SYSTEMLÖSUNGEN UND SPEZIALENTWICKLUNGEN

All rights reserved. © Soehhle Professional GmbH &amp; Co. KG. Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung von Soehhle Professional GmbH &amp; Co. KG ist untersagt. Technische Änderungen vorbehalten

