



GIMA

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel 199 400 401 – fax 199 400 403 – gima@gimaitaly.com
Export: phone + 39 02 953854209/221/225 – fax + 39 02 95380056
- export@gimaitaly.com – www.gimaitaly.com

Cod. 27261

Bilancia veterinaria – piccoli animali

**Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.
La Vostra bilancia digitale per cuccioli è uno strumento ad alta precisione,
Quindi si prega di evitare di sovraccaricare il dispositivo con carichi eccessivi !**

Attenzione, gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

La Vostra bilancia digitale per cuccioli è stata progettata per misurare il peso dei Vostri cuccioli e visualizzare la differenza del peso.

Caratteristiche tecniche:

- Funzione Hold automatica
- 4 sensori ad alta precisione, sistema di misura della sollecitazione
- Display con funzionalità di visualizzazione della differenza del peso
- Funzione tara
- Display LCD di facile lettura
- Indicatore batteria quasi scarica ("Lo")
- Spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico ("Err")
- Capacità: 20 kg
- Sensibilità: 10 g
- Unità di misura Kg/lb/st selezionabile dall'utente
- Alimentazione: batterie al litio (incluse)

Manuale utente

Pulsanti di funzionamento:

1. La bilancia può essere accesa e spenta con il pulsante ON/OFF. (Premere una volta il pulsante)
2. Con il pulsante TARE può essere utilizzata la funzione tara, la scritta "0.00" compare sul display due secondi dopo la pressione del pulsante.
3. Tramite il pulsante Kg, Lb, St può essere selezionata l'unità di misura, l'unità di misura utilizzata è visualizzata sul lato destro del display.

Come utilizzare la bilancia:

1. Si prega di rimuovere la pellicola protettiva dalle batterie prima dell'utilizzo.
2. Prima di pesare un cucciolo installare il vassoio alla base di misurazione per rendere il supporto del vassoio stabile.
3. Premere una volta il pulsante ON/OFF la scritta "0.00" compare sul display.
4. Posizionare il cucciolo sulla bilancia. Il peso sarà visualizzato entro pochi secondi e memorizzato automaticamente. La comparsa di una "M" sul display indica la presenza di dati nella memoria. Dopo la successiva pesatura lo schermo mostra la massa rilevata e la differenza tra il peso misurato e quello precedente. I due valori sono visualizzati ad intervalli di due secondi. L'ultima misurazione è salvata automaticamente in memoria sia in caso di spegnimento manuale ed automatico.
5. Premendo una volta il pulsante ON/OFF la bilancia si spegne. Se la bilancia non è utilizzata per 30 secondi si spegnerà automaticamente.

Messaggi d'errore visualizzati dal display:

- "LO", indica che le batterie sono scariche, occorre procedere con la loro sostituzione.
- "Err", indica che la bilancia è sottoposta ad un carico eccessivo (il sovraccarico può causare malfunzionamenti ai sensori).
- "Out 2", indica un malfunzionamento ai sensori (dopo un sovraccarico o dopo una pesatura eccessiva). In questo caso la garanzia decade.

Funzione memoria:

Dopo l'accensione della bilancia la scritta "M" è visualizzata. Questo segnala che l'ultima misurazione effettuata è presente in memoria, quindi la differenza di peso dovrebbe essere visualizzata. Quando non è necessario visualizzare la differenza del peso è possibile cancellare i dati in memoria premendo ripetutamente il pulsante TARE per 3 secondi. La scritta "M" scomparirà dal display. Anche la rimozione delle batterie ha come effetto la cancellazione dei dati memorizzati.

Informazioni sulla tara:

Se il peso complessivo del vassoio e degli ausili (lenzuolino, cuscino etc.) è inferiore ai 5 kg dopo la pressione del pulsante TARE il display visualizza "0.00" ed il peso massimo misurabile è di 20 kg. Se il peso aggiuntivo è superiore ai 5 kg dopo la pressione del pulsante TARE il display visualizza "0.00" ma il peso massimo che può essere misurato è inferiore a 20 kg (più precisamente: 20 kg meno il peso aggiuntivo).

Note:

La temperatura ambientale può influenzare significativamente la precisione di misurazione. Misurazioni corrette ed accurate possono essere ottenute ad una temperatura ambiente (20-25 gradi Celsius). Per pulire la bilancia si raccomanda l'utilizzo di un panno inumidito senza utilizzare alcun solvente.



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.