



Con SURFATTANTE



Soluzione fisiologica con detergente delicato ed antisettico. Per una azione gradevole ed efficace.

Grazie all'effetto detergente e all'azione meccanica del lavaggio, facilita la rimozione del biofilm batterico e delle secrezioni dense e viscosse.

NARIDEK Soluzione isotonica sterile per lavaggi nasali contiene **Polisorbato 80**, un surfattante non ionico, molto ben tollerato dalla mucosa, in grado di promuovere la disgregazione del biofilm facilitandone la rimozione.

Il **Polisorbato 80** è particolarmente efficace sul biofilm prodotto dallo *Pseudomonas aeruginosa*. La combinazione dell'effetto chimico del polisorbato e di quello meccanico del lavaggio consentono un'efficace azione inibitoria alla formazione del biofilm ed una maggiore rimozione del biofilm già formato.


Christine M Toutain-Kidd et al
Polysorbate 80 Inhibition of Pseudomonas Aeruginosa
biofilm formation and its cleavage by the secreted Lipase LipA
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2009, p 136-145



1 Intiepidire la sacca a 35 - 37 °C circa, immergendola in acqua calda (si consiglia di verificare la temperatura con un termometro).




2 Togliere il tappo di protezione svitandolo ed avvitare il raccordo maschio del dispositivo.

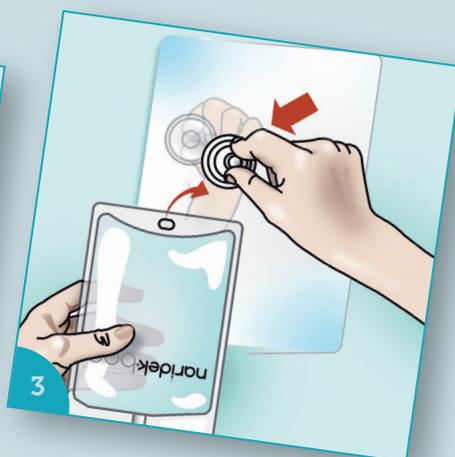

3 Appendere la sacca con l'ausilio della ventosa ad una altezza superiore a quella della testa reclinata.



4 Rompere la sigillatura all'interno della sacca. Inclinare la testa in avanti sul lavandino in posizione più bassa rispetto alle spalle.

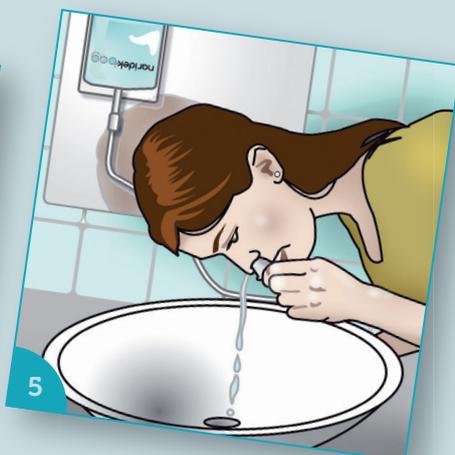

5 Appoggiare delicatamente l'irrigatore nasale sino a chiudere una narice tenendo la sacca al di sopra della testa per consentire la fuoriuscita del liquido per gravità.



6 Per coloro che preferiscono utilizzare il lavaggio a spruzzo, inserire il connettore nasale alla sacca dopo avere svitato il tappo protettivo, inclinare la testa sopra il lavandino ed inserire delicatamente l'insero nasale in una narice, stringere con la mano la sacca e regolare il flusso con la pressione.

naridek® bag

È un prodotto

neupharma

NEUPHARMA S.r.l.
Piazza DUOMO 8 - 40026 - IMOLA (BO)
telefono: 0542 26540 fax: 0542 615881
info@neupharma.it
www.neupharma.it