


## CUSCINI ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA


- A TRE SEZIONI  
CA-100
- CON FORO CENTRALE  
CA-101
- CON DEPRESSIONE CENTRALE  
CA-102
- A CIAMBELLA  
CA-103
- DORSALE  
CA-104

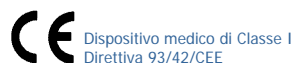

Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

## CUSCINI ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

- A TRE SEZIONI  
CA-100
- CON FORO CENTRALE  
CA-101
- CON DEPRESSIONE CENTRALE  
CA-102
- A CIAMBELLA  
CA-103
- DORSALE  
CA-104

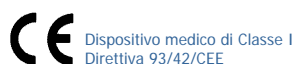

Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

### Descrizione

Cuscino per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.

L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.

### Indicazioni

Prevenzione del decubito in pazienti costretti su carrozzine allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre forze di taglio e frizione e di favorire la circolazione di aria.

### Come usare il dispositivo

Appoggiare il cuscino sulla carrozzina con i fissaggi in velcro posti nella parte posteriore. Assicurare quindi ad una struttura rigida della carrozzina con i fissaggi in velcro.

### Avvertenze

Il dispositivo è indicato per la prevenzione del decubito. Ciò nonostante esso non è in grado di controllare tutti i fattori che favoriscono la formazione di piaghe da decubito. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene.

A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

### Composizione

Interno Fibra cava siliconata

Fodera Cotone 100% sanforizzato da 300 gr/m<sup>2</sup>

### Dati tecnici

Codice	Dimensioni	Peso
CA-100	45 x 45 cm	500 gr
CA-101	45 x 45 cm	500 gr
CA-102	45 x 45 cm	540 gr
CA-103	45 x 43 cm	500 gr
CA-104	45 x 60 cm	600 gr

### Istruzioni di lavaggio



Lavabile alla temperatura massima di 40° con detergenti neutri



Non candeggiare



Non centrifugare



Non stirare

### Conservazione

Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

### Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Lotto di fabbricazione **1006**

Rev. 00

### Descrizione

Cuscino per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.

L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.

### Indicazioni

Prevenzione del decubito in pazienti costretti su carrozzine allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre forze di taglio e frizione e di favorire la circolazione di aria.

### Come usare il dispositivo

Appoggiare il cuscino sulla carrozzina con i fissaggi in velcro posti nella parte posteriore. Assicurare quindi ad una struttura rigida della carrozzina con i fissaggi in velcro.

### Avvertenze

Il dispositivo è indicato per la prevenzione del decubito. Ciò nonostante esso non è in grado di controllare tutti i fattori che favoriscono la formazione di piaghe da decubito. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene.

A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

### Composizione

Interno Fibra cava siliconata

Fodera Cotone 100% sanforizzato da 300 gr/m<sup>2</sup>

### Dati tecnici

Codice	Dimensioni	Peso
CA-100	45 x 45 cm	500 gr
CA-101	45 x 45 cm	500 gr
CA-102	45 x 45 cm	540 gr
CA-103	45 x 43 cm	500 gr
CA-104	45 x 60 cm	600 gr

### Istruzioni di lavaggio



Lavabile alla temperatura massima di 40° con detergenti neutri



Non candeggiare



Non centrifugare



Non stirare

### Conservazione

Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

### Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Lotto di fabbricazione **1006**

Rev. 00