



MANUALE D'ISTRUZIONI
MOVE, PEELING ULTRASONICO PORTATILE (SKIN SCRUBBER)
Ref. P-03

DESCRIZIONE: Spatola portatile esfoliante.

TRATTAMENTO PEELING ULTRASONICO: Grazie al peeling a ultrasuoni si ottiene l'esfoliazione, la pulizia profonda e la stimolazione della rigenerazione cellulare della pelle. Il risultato del peeling a ultrasuoni è la riduzione delle rughe e la pelle appare ringiovanita, ben idratata e luminosa. Mediante gli ultrasuoni la spatola trasmette alla pelle onde a frequenza molto bassa e vibrazioni, che rompono in particelle minuscole la sporcizia aderita all'epidermide, e ammorbidiscono la pelle senza bisogno di utilizzare il vapore. Così facendo è possibile rimuovere facilmente le cellule morte, i comedoni, i detriti e la sporcizia della pelle senza aggredirla e minimizzando il dolore.

AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchiatura. Se fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto il fornitore o un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde prevenire danneggiare egli elementi elettrici dell'apparecchiatura.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Se il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare rischi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2006/95/EC
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2004/108/EC



RICICLAGGIO



Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliabile ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'azienda declina ogni responsabilità su eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto. L'azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sulle apparecchiature, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerle.



CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.
- L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.



Figura 1


ISTRUZIONI D'USO

1. Pulire la pelle e applicare un gel conduttore o una crema sulla zona da trattare.
2. Attaccare la spina alla corrente.
3. Accendere la spatola tramite il tasto d'accensione.
4. Regolare il livello d'intensità mediante il tasto indicato nella Figura 1.
5. Per selezionare il tipo d'onda premere il tasto indicato nella Figura 1. Quando si lavora con l'onda continua, la spia luminosa dell'onda rimarrà accesa permanentemente. Quando si lavora con l'onda pulsata, la spia lampeggerà intermittentemente. Quando si lavora con l'onda combinata la spia si accenderà intermittentemente.
6. Una volta terminato il trattamento spegnere la spatola e staccare la spina dalla corrente.




Esistono 3 tipi d'onda selezionabili:

- **Continua**

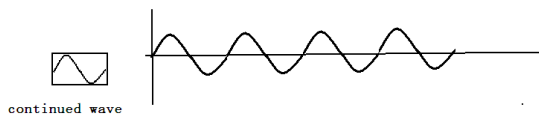


Produce un calore costante sul tessuto. Non applicare per troppo tempo per evitare scottature sulla cute. Non lavorare a potenza troppo elevata. Indicata per pelli normali.

- **Pulsata**

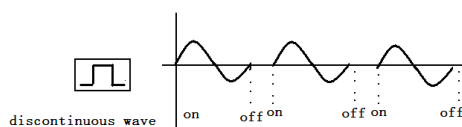

Non provoca calore sulla pelle, per questo motivo è possibile lavorare a potenze superiori. Indicata per pelli sensibili e delicate.

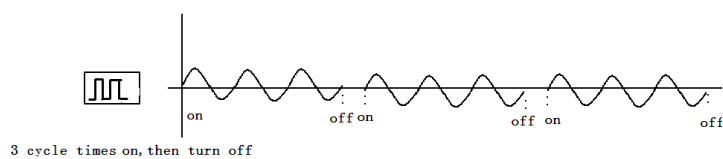

- **Combinata**

Combinazione delle due onde.



Metodo d'applicazione della spatola:

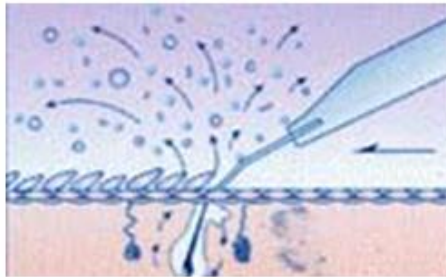


Figura 2. Metodo d'applicazione della spatola.

NOTE

Si consiglia di iniziare il trattamento con l'onda pulsata con potenza al minimo e aumentare poco a poco la potenza. Se il paziente si sente a suo agio cambiare dall'onda pulsata alla combinata con la potenza al minimo. Aumentare poco a poco la potenza, e se il paziente si sente ancora a suo agio seguire con l'onda continua alla potenza in cui il paziente si sente comodo e a discrezione del professionista.

La spatola ha un tempo prestabilito di lavoro di 15 minuti, e trascorso questo tempo emetterà un ronzio e si spengerà automaticamente.

PRECAUZIONI

- Le persone con le seguenti malattie non possono utilizzare questo apparecchio: persone con malattie del cuore, malattie infettive, ipersensibilità o con protesi metalliche mediche.
- Non mantenere la spatola nella stessa posizione durante troppo tempo, per evitare bruciature.
- Applicare il prodotto conduttivo in abbondanza.

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com



- Manipolare la spatola con molta cura perché è delicata. Fare attenzione alla lama della spatola, giacché ogni danno potrebbe provocare ferite sulla pelle.

MANTENIMENTO

- Dell'eventuale olio sulla spatola si deve ritirare immediatamente.
- Dopo l'uso, pulire la spatola e conservarla nel cappuccio protettore.
- Riporre e conservare la spatola con cura per evitare danneggiarla.

SCHEMA TECNICA

Dimensioni dell'imballaggio: 20x15x5 cm

Peso lordo: 1 Kg

Peso netto: 0,8 Kg

Caratteristiche di lavoro:

Frequenza di lavoro: 25-27 MHz

Potenza di lavoro: 2-4 W

Caratteristiche elettriche:

Tensione nominale: 220 ~ 240 V

Frequenza: 50/60 Hz