

# PERISPHERA® - A



Sonda anale a 4 elettrodi, per la rieducazione perineale, mediante elettrostimolazione e biofeedback EMG

Destinata al trattamento di paziente maschio con esiti d'incontinenza urinaria post-prostatectomia o di pazienti con disturbi alla defecazione. La profondità d'inserimento è regolabile, da 40 a 55 mm, secondo la costituzione anatomica del paziente, mediante la flangia posteriore a 4 posizioni che determina anche il corretto orientamento della sonda. I 4 elettrodi (2 anteriori e 2 posteriori) possono essere collegati a due canali separati dell'apparecchio elettromedicale oppure ad un unico canale (mediante appositi adattatori filari ad "Y").



Il tipo di collegamento dei 4 elettrodi permette di trattare selettivamente il muscolo pubo-rettale e lo sfintere anale interno. L'estremità della sonda, destinata a superare lo sfintere anale per essere inserita nell'ampolla rettale, ha una forma sferoidale opportunamente appiattita per limitare l'interferenza con una prostata di volume aumentato, nel trattamento del paziente maschio con ipertrofia prostatica benigna.