



## PERISPHERA® - U

Sonda vaginale a 4 elettrodi, per la rieducazione perineale, mediante elettrostimolazione e biofeedback EMG

Caratterizzata da un doppio circuito formato da due grandi elettrodi piatti (inferiori), destinati alla stimolazione globale del piano perineale, e due elettrodi laterali con forma "a sella", destinati alla stimolazione indifferenziata dei due rami DX e SX del muscolo pubo-coccigeo.



Per uno sfruttamento ottimale sarebbe opportuno utilizzare entrambi i circuiti tuttavia l'operatore che è abituato ad utilizzare sonde dotate solo di elettrodi laterali, e ha a disposizione o vuole utilizzare solamente un canale di stimolazione, può collegare l'apparecchiatura solamente ai connettori bianchi.

