

## **POLTRONA ELEVABILE ELETTRICA BERGÈ'**

**Ref. Bergè 1 (1 motore) – Ref. Bergè 2 (2 motori)**

**Ref. Bergè 1-BA (1 motore) – Ref. Bergè 2-BA (2 motori)**

*Il colore del modello nella foto è puramente indicativo*



### **Descrizione**

Poltrona elevabile dal design classico, avvolgente e confortevole, disponibile con 1 o 2 motori. Struttura in legno rivestito da uno strato di poliuretano e meccanica in metallo. Rivestimento in tessuti con trattamento antimacchia o ecopelle, disponibili in diversi colori (Vedi tabella colori). Poliuretano espanso ecologico a densità differenziata rivestito da una falda in Dacron. Piedini in PVC resistente.

Il meccanismo della poltrona a due motori permette la regolazione separata dell'inclinazione dello schienale e dell'alza gambe. La soluzione ad un motore, invece, permette di regolare il movimento dello schienale e dell'alza gambe in simultanea. Le poltrone sono equipaggiate di serie con 2 rotelle posteriori che, inclinando le poltrone all'indietro, permettono di spostarle facilmente. Possono essere dotate, a richiesta, di un pratico meccanismo di sollevamento (ROLLER vedi tabella accessori) su quattro ruote indipendenti azionato mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore, un sistema funzionale e pratico che permette di spostare facilmente una poltrona da una stanza all'altra e, sempre a richiesta, in configurazione con braccioli amovibili (BA) per agevolare l'avvicinamento al tavolo, i trasferimenti laterali oppure inserire il tavolino accessorio.


### **Destinazione d'uso**

Ausilio indicato per persone con limitate capacità motorie.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y123606	
Identificativo di Registrazione	1198668	
Codice Classificazione ISO	nd	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura C.E.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(Nome e numero dell'Ente)	n/a	
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Metodo di sterilizzazione	n/a	
Periodo di validità	n/a	
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2020 (INTERMED)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	SPAZIORELAX spa	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche e Ingombri

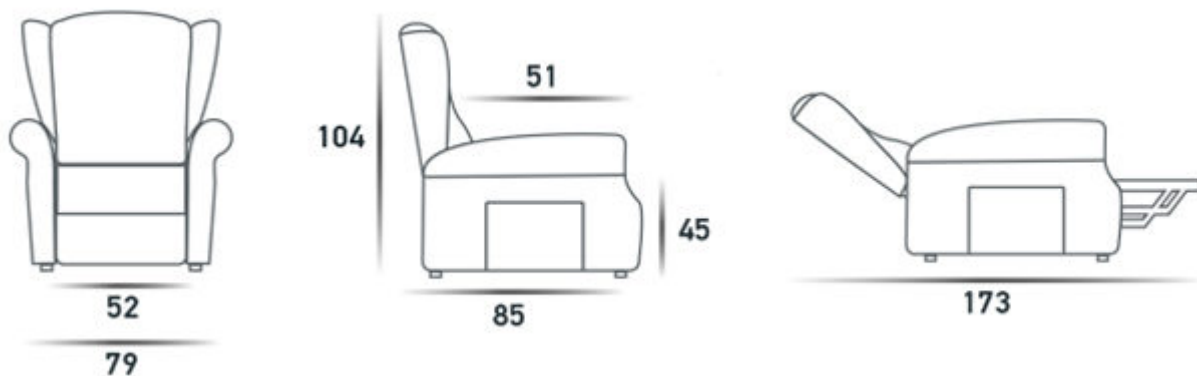

Modello	Peso	Portata
Berge 1 (1 motore)	45 Kg	120 Kg
Berge 2 (2 motori)	47 Kg	120 Kg
Bergè 1-BA (1 motore braccioli amovibili)	45 Kg	120 Kg
Bergè 2 BA (2 motori braccioli amovibili)	47 Kg	120 Kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Composizione Tessuti (Consultare la tabella colori per la scelta)

**Tessuto Savoy:** 89% Poliestere – 8% Poliammidica – 2% Cotone – 1% Viscosa – Peso: gr/mtl. 550

**Tessuto Globe:** 100% Poliestere – Peso: gr/mtl. 560

**A richiesta disponibili rivestimenti in materiale Ecopelle nei vari colori**

## Configurazioni

**Bergè 1:** Posizione Relax Pediera anticipata. È un meccanismo a 1 motore che permette, grazie alla funzione anticipo pediera, di sollevarla prima dell'abbassamento dello schienale. Consente di raggiungere una posizione con schienale eretto adatta a leggere un libro o a guardare la televisione comodamente seduti in poltrona.

**Bergè 2:** Posizione Relax Indipendente. È un meccanismo a 2 motori capace di generare il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiatesta. In questo modo, grazie alla possibilità di selezionare quale congegno attivare, è possibile ottenere differenti combinazioni.

**Bergè 1-BA:** Posizione Relax Pediera anticipata. È un meccanismo a 1 motore che permette, grazie alla funzione anticipo pediera, di sollevarla prima dell'abbassamento dello schienale. I braccioli sono amovibili per agevolare l'avvicinamento al tavolo o i trasferimenti laterali. Consente di raggiungere una posizione con schienale eretto adatta a leggere un libro o a guardare la televisione comodamente seduti in poltrona.

**Bergè 2-BA:** Posizione Relax Indipendente. È un meccanismo a 2 motori capace di generare il movimento dello schienale in modo autonomo rispetto a quello del poggiatesta. In questo modo, grazie alla possibilità di selezionare quale congegno attivare, è possibile ottenere differenti combinazioni. I braccioli sono amovibili per agevolare l'avvicinamento al tavolo o i trasferimenti laterali.

## Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
KIT ROLLER	Meccanismo di sollevamento su quattro ruote indipendenti	1
TAV	Tavolino amovibile (solo per Bergè 1-BA e Bergè 2-BA)	1
BERGE-BA-R	Braccioli amovibili (solo per Bergè 1-BA e Bergè 2-BA)	2
BERGE-AF	Kit fodere di protezione	1
BERGE-AB	Batteria ricaricabile	1

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
--------------------------------	---

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Berge-x*	Poltrona elevabile	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

\* Poltrona nella configurazione scelta

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	05//02/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	26/11/2020	Aggiornamento codici accessori

