

KIT ANTIDECUBITO TAURUS IV

Ref. AK-906



Descrizione

Kit antidecubito composto da compressore con regolatore e sovra-materasso a 18 elementi intercambiabili. Il sovra-materasso è caratterizzato da una base e da elementi intercambiabili in Nylon/PVC con cinghie di fissaggio. Il telo di copertura, impermeabile e traspirante, è realizzato in Nylon/PU a cerniera su tre lati. Il kit è dotato di tubi a tre vie con connettori CPC per il gonfiaggio e un sistema CPR per lo sgonfiaggio rapido durante procedure di emergenza.

Il compressore ha indicatori di bassa pressione e pressione normale. È Possibile programmare, mediante manopola di regolazione, la pressione desiderata. Un allarme acustico e visivo permette di segnalare se il livello di pressione programmato non è stato raggiunto.

La funzione Statica consente di disattivare la modalità d'uso normale a scambio d'aria, mantenendo le sezioni del sovra-materasso in pressione.

Destinazione d'uso

Kit per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati allo scopo di distribuire meglio le pressioni nei punti di appoggio del corpo.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	AK-906 AK-906M AK-906C	n/a Y033306 Y033399
Identificativo di Registrazione BD/RDM	AK-906 AK-906M AK-906C	118243/R 1307713/R 1307615/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2015	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	


Caratteristiche Tecniche – Sovra-materasso AK-906M

Dimensioni	198 x 88 x 11 cm
Materiale Base ed Elementi	Nylon/PVC
Materiale Telo di copertura	Nylon/PU – colore blu
Portata massima	160 kg
Numero di elementi	18
Funzione cuscino	Si
Tipologia connettori	CPC a 3 vie
Valvola sgonfiaggio	CPR

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche Tecniche – Compressore AK-906C

Dimensioni	28 x 20 x 10 cm
Peso	2,2 kg
Alimentazione	220 V / 50 Hz , 1 A
Range di pressione	30-60 mmHg
Flusso d'aria	7-8 l/min
Ciclo di lavoro	12 min
Funzione statica	Si
Allarme	Acustico e visivo. Modalità silenziato.
Indicatori di pressione	Bassa. Normale.
Regolatore di pressione	Manopola per la pressione di lavoro

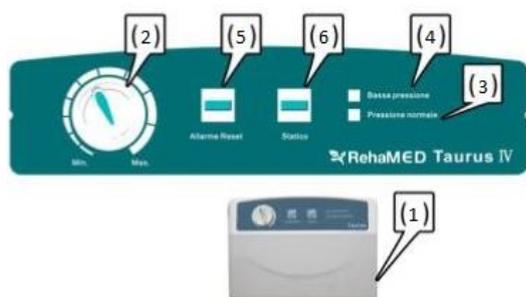

1. Tasto di accensione
2. Regolatore pressione di lavoro
3. Indicatore pressione normale
4. Indicatore bassa pressione
5. Tasto spegnimento allarme
6. Tasto Funzione statica
7. Elementi intercambiabili

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. In ogni caso attenersi alle istruzioni d'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Il dispositivo non è sterilizzabile in autoclave.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il kit.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AK-906	Kit antidecubito Taurus IV con sovra-materasso e compressore.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	28/12/2018	Aggiornamento del sistema gestione qualità aziendale nel footer della scheda.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.